

Phonak Fast Facts



Phonak Audéo B-R

O que é?

O Phonak Audéo B-R é um aparelho auditivo RIC com inúmeros recursos e com uma bateria interna recarregável, eliminando assim a necessidade de substituição de baterias convencionais descartáveis. Graças a uma bateria de íons de lítio, o Audéo B-R proporciona 24 horas* de autonomia de energia com uma única recarga. Além disso, o novo design da caixa oferece vantagens como a resistência à poeira e umidade (classificação IP68).

Por que usá-lo?

Com as baterias recarregáveis, os pacientes se beneficiam de uma audição sem complicações, sem a necessidade de ter que substituir baterias ou ter que transportar baterias adicionais. Uma vantagem adicional da bateria de íons de lítio consiste na deterioração e desgaste reduzidos desta, ao longo do tempo de uso, sem afetar o desempenho do aparelho auditivo. Além disso, a remoção da gaveta da bateria garante um aumento na durabilidade do aparelho auditivo. Os profissionais de saúde auditiva também se beneficiam, na medida em que podem dedicar mais tempo a outros tópicos não relacionados à substituição e manutenção da bateria.



Como usá-lo?

O Audéo B-R é fácil de usar. Basta remover os aparelhos auditivos do carregador e pressionar o botão do aparelho durante 3 segundos até a luz indicadora piscar brevemente em verde. Desta forma, os aparelhos auditivos são ligados e prontos para serem utilizados. No final do dia, o paciente terá apenas que colocar os aparelhos auditivos no carregador. Os aparelhos auditivos desligarão automaticamente assim que estiverem na posição de carregamento. A luz indicadora verde pisca lentamente para indicar o carregamento. Os aparelhos auditivos estão completamente carregados e prontos para serem utilizados assim que a luz parar de piscar e permanecer contínua. O tempo de carregamento para um aparelho auditivo com a bateria completamente descarregada é de 3 horas.

*Resultados esperados quando totalmente carregado e uso de até 80 minutos de período de transmissão sem fio. Consulte www.phonakpro.com/evidence.

Para obter mais informações sobre os aparelhos auditivos recarregáveis Phonak Audéo B-R e as respectivas opções de carregamento, visite www.phonakpro.com/audeo-b ou entre em contato com seu representante Phonak.