

# Phonak

## Fast Fact

### TV Connector

#### O que é?

O TV Connector é um transmissor, plugue e use. Ele conecta diretamente os aparelhos auditivos Phonak compatíveis, com a TV ou leitor de mídia, sem necessidade de um acessório. Além disso, proporciona excelente qualidade sonora na transmissão sem fio de qualquer TV e sistema estereo.



#### Por que usá-lo?

O TV Connector oferece aos usuários:

- Uma solução prática: plugue e use
- Compatibilidade Dolby™
- Transmissão fácil para vários ouvintes em um raio até 15 m de distância
- 3 modos de ativação (automático, manual e silencioso)
- Controles manuais com os novos botões ligar/desligar e de volume

#### Como usá-lo?

O TV Connector pode ser conectado diretamente a qualquer TV usando as interfaces de cabo óptico (Toslink, digital) ou

cabo de áudio 3,5 mm (analógico). A transmissão é iniciada automaticamente quando a TV e o TV Connector estiverem ligados, e o usuário na área de alcance (15 m) do TV Connector. O profissional de saúde auditiva também pode alterar o modo de ativação para se adequar às necessidades do usuário. Para conectar vários ouvintes, pressione o botão de pareamento no TV Connector. Os usuários em um raio de 1 m do TV Connector serão automaticamente conectados.

Para obter mais informações sobre o TV Connector, visite [www.phonak.com.br](http://www.phonak.com.br) ou entre em contato através do e-mail: [produto@phonak.com](mailto:produto@phonak.com)



Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories