

Phonak Fast Facts



Streaming-Balance

Was ist das?

Streaming-Balance ist eine Funktion zur Modifizierung der Verstärkung bei Phonak Audéo™ B-Direct Hörgeräten, mit der der Höreräteträger die Lautstärke des Streaming-Signals gegenüber Umgebungsgeräuschen durch Drücken des Lautstärkestellers anpassen kann.


Wozu dient es?

Nutzen der Streaming-Balance für Ihre Kunden:

- Steigerung der Dynamik des Streaming-Signals um 30 dB¹ gegenüber Störgeräuschen in der Umgebung.
- Angenehme Hörumgebung beim Streaming.
- Einfacher Zugang über den Taster des Hörgerätes, den Lautstärkesteller des Telefons (während eines Anrufs) oder über die Phonak Remote App (während des Fernsehens).

Wie wird es verwendet?

Der Höreräteträger kann auf die Streaming-Balance zugreifen, sobald das Hörgerät auf ein Streaming-Programm wechselt. Abhängig von den individuellen Anforderungen des Kunden kann entweder das Streaming-Signal oder das Umgebungsgeräusch hervorgehoben werden. Im Rahmen der Standardeinstellung wird durch Drücken des Tasters des rechten Hörgeräts das Streaming-Signal anstelle der Umgebungsgeräusche betont. Durch Drücken des Tasters des linken Hörgeräts wird das Umgebungsgeräusch anstelle des Streaming-Signals betont. Während eines Telefongesprächs kann die Streaming-Balance auch über die Lautstärkesteller des Mobiltelefons gesteuert werden. Beim Fernsehen hat der Höreräteträger über die Phonak Remote App einfachen Zugriff auf einen Schieberegler.

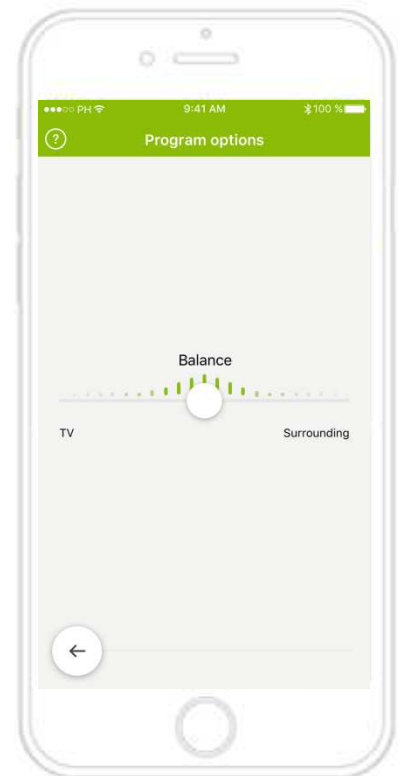

¹ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an claims@phonak.com.

Weitere Informationen zu Phonak Audéo™ B-Direct finden Sie unter www.phonakpro.de/audeo-b-direct.