

Phonak Fast Facts



Phonak Audéo™ B-Direct

Was ist das?

Audéo B-Direct ist das erste MFA-Hörgerät (MFA = Made For All; für alle geeignet) von Phonak, mit dem eine drahtlose Anbindung an jedes Mobiltelefon* ohne einen am Körper getragenen Streamer möglich ist. Dank des SWORD™-Chips, des firmeneigenen Phonak 2,4-GHz-Funkchips und der Belong Plattform erweitert das Audéo B-Direct das Portfolio von Phonak mit einer Lösung für die direkte drahtlose Anbindung.

Wozu dient es?

Audéo B-Direct ermöglicht

- Die direkte drahtlose Anbindung an alle Bluetooth®-Telefone*, unabhängig von Betriebssystem oder Hersteller. Hörgeräteträger, die die direkte drahtlose Anbindung nutzen wollen, benötigen kein anderes Telefon.
- Echtes freihändiges Telefonieren. Der Hörgeräteträger hört das Telefon direkt über die Hörgeräte klingeln und kann den Anruf annehmen, ohne das Telefon zu berühren.
- Automatische Verbindung zum TV Connector für qualitativ hochwertigen Stereo-Hörgerausch beim Fernsehen.
- Streaming-Balance zur Anpassung der Verstärkung von Umgebungsgeräuschen bzw. des Streaming-Signals.



Wie wird es verwendet?

Audéo B-Direct wird mit dem neuen Standard-Programmierungsgerät, Noahlink Wireless, und ab Target 5.2 programmiert. Nach der Programmierung kann es direkt mit jedem* Bluetooth-Mobiltelefon verbunden werden. Die Annahme oder Abweisung von Telefonanrufen ist mit einem einfachen Drücken des Tasters des Hörgerätes möglich. Es genügt, wenn sich das Telefon in der näheren Umgebung befindet, um die Verbindung herzustellen und ein freihändiges Telefongespräch zu führen. Die Verbindung zum Fernseher erfolgt durch einfaches ‚Plug and Play‘. Wenn sich die Hörgeräte in der näheren Umgebung befinden, verbinden sie sich automatisch mit dem TV Connector und ermöglichen hervorragenden Hörgerausch.

* mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen

Weitere Informationen zu Phonak Audéo™ B-Direct finden Sie unter www.phonakpro.de/audeo-b-direct.