

# Phonak Fast Facts



## Phonak Bolero™ B-PR

### Was ist das?

Phonak Bolero B-PR ist das neue wiederaufladbare HdO-Hörgerät mit Telefonspule, Lautstärksteller, einem integrierten Lithium-Ionen-Akku und vollem Funktionsumfang. Mit Bolero B-PR gehören regelmäßige Batteriewechsel der Vergangenheit an. Das Bolero B-PR bietet 24 Stunden\* einzigartigen Hörerlebnis mit einem Aufladevorgang. Zudem verfügt es über ein neues Gehäuse, das wasser- und staubresistent (IP68) und damit besonders widerstandsfähig ist.



### Wozu dient es?

Der festintegrierte Akku bietet dem Hörgeräteträger zahlreiche Vorteile: das mühsame Wechseln und ständige mit sich führen von Ersatzbatterien entfällt. Im Vergleich zu anderen Akkus verfügen Lithium-Ionen-Akkus über ein intelligentes Kapazitätsmanagement. Die Kapazität lässt über die Zeit nur sehr gering nach. Durch das fehlende Batteriefach wird die Widerstandsfähigkeit weiter erhöht.

### Wie wird es verwendet?

Bolero B-PR ist einfach zu handhaben. Nehmen Sie die Hörgeräte einfach aus dem Ladegerät und drücken Sie den Taster 3 Sekunden lang, bis die Statusanzeige kurz grün leuchtet. Die Hörgeräte sind jetzt eingeschaltet und bereit. Legen Sie die Hörgeräte am Ende des Tages in das Ladegerät. Sie rasten in den Ladesteckplätzen ein und schalten sich automatisch aus. Die grüne Statusanzeige blinkt langsam und zeigt dadurch an, dass das Hörgerät aufgeladen wird. Sobald die Statusanzeige konstant leuchtet statt blinkt, sind die Hörgeräte voll aufgeladen. Ein leeres Hörgerät ist in 3 Stunden aufgeladen.

Weitere Informationen zu den wiederaufladbaren Phonak Bolero B-PR Hörgeräten und ihren Ladeoptionen finden Sie unter [www.phonakpro.de/bolero-b](http://www.phonakpro.de/bolero-b)

\*Erwartete Betriebszeit wenn voll aufgeladen, inklusive 80 Minuten Wireless-Streaming. Mehr dazu auf [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence)