

Verwendung von Roger™ Touchscreen Mic und Roger™-Empfängern

Reference Sheet

roger



Das Roger Touchscreen Mic kann einfach und intuitiv im Klassenzimmer genutzt werden. Es zeigt den Lehrkräften und Schülern an, ob das Mikrofon eingeschaltet und aktiv ist.

Mikrofon



Roger Touchscreen Mic

Zum Einschalten drücken Sie 3 Sekunden die Ein-/Aus-Taste, die sich seitlich am Mikrofon befindet. Die grüne Statusanzeige blinkt, bis es komplett hochgefahren ist.

- Hängen Sie das Roger Touchscreen Mic mit der Umhängekordel um den Hals des Sprechers und passen Sie die Höhe an, bis der obere Teil des Mikrofons etwa 20 cm von seinem Mund entfernt ist.
- Wenn ein Schüler verbunden werden soll, halten Sie das Roger Touchscreen Mic in die Nähe des Roger-Empfängers (max. 10 cm Abstand) und tippen Sie auf das **Connect** Symbol. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Empfänger am anderen Ohr.
- Das Roger Touchscreen Mic kann durch Drücken der **Stummschalt-Taste** stumm geschaltet werden. Die Statusanzeige an der Taste leuchtet nun rot.
- Schalten Sie das Roger Touchscreen Mic bei Nichtnutzung aus, indem Sie 3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste drücken. Sie erhalten dann die Aufforderung, das Ausschalten zu bestätigen. Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen (Ja)**. Laden Sie es täglich mit dem richtigen USB-Ladegerät oder im Roger Charging Rack auf.

Empfänger



Roger X

- Bringen Sie den Roger X am Audioschuh des Hörsystems an. Er kann nun verwendet werden.
- Einmal mit dem Roger Netzwerk verbundene Empfänger müssen nicht erneut verbunden werden, auch nicht nach einem Aus- und erneuten Einschalten.
- Sollte der Empfänger in der Schule verbleiben, entfernen Sie Roger X vom Hörgerät nach dem Unterricht, so wie Ihr Hörgeräteakustiker Ihnen das gezeigt hat.



Roger designintegriert

- Designintegrierte Roger-Empfänger passen zu der Optik der Hörgeräte oder Cochlea-Implantate des Trägers.
- Einmal mit dem Roger Netzwerk verbundene Empfänger müssen nicht erneut verbunden werden, auch nicht nach einem Aus- und erneuten Einschalten.
- Designintegrierte Empfänger müssen nicht in der Schule belassen werden.