

Roger™ BaseStation



Die Roger BaseStation ist ein stationärer Roger-Sender, der den Ton von einem Multimedia-Gerät an (02) Roger-Empfänger und Roger DigiMaster 5000/7000 Lautsprecher überträgt. In größeren Räumen kann die Übertragungsbereichweite der Roger BaseStation mithilfe eines oder mehrerer Roger Repeater erweitert werden. Die Roger BaseStation kann mit allen Roger Geräten für die Schule verbunden werden, inklusive Roger WallPilot.

Weitere Informationen finden Sie auf www.phonakpro.de

Einstellung

Wie verbindet man die Roger BaseStation mit einem Multimedia-Gerät?

Schließen Sie das Kabel des Multimedia-Geräts am symmetrischen Anschluss (XLR- oder 6,3-mm-Buchse) oder am unsymmetrischen Anschluss (3,5-mm-Buchse) der Roger BaseStation an.

Wie verbinde ich einen oder mehrere Roger-Empfänger mit der Roger BaseStation?


Drücken Sie kurz die **Connect**-Taste auf der Frontplatte der BaseStation, während Sie gleichzeitig einen Roger-Empfänger maximal 10 cm von der Roger BaseStation entfernt halten. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jedem weiteren Roger-Empfänger. Diese Verbindung muss nur einmalig hergestellt werden.

Wie verbinde ich einen Roger Repeater mit der Roger BaseStation?

Drücken Sie kurz die **Connect**-Taste auf der Frontplatte der BaseStation, während Sie gleichzeitig einen Roger Repeater maximal 10 cm von der Roger BaseStation entfernt halten. Verbinden Sie jeden weiteren Roger Repeater auf dieselbe Art und Weise mit dem Netzwerk. Diese Verbindung muss nur einmalig hergestellt werden.

Positionierung von Roger BaseStation und Roger Repeater

Die Roger BaseStation verbindet sich automatisch mit dem Lautsprechersystem, egal wo sie positioniert ist. Die Positionierung eines Roger Repeaters hängt von der Größe des Raums sowie der Position des Lautsprechersystems und/oder des Zuhörers ab. In der Abbildung sehen Sie ein Positionierungsbeispiel. In größeren Räumen können zusätzliche Roger Repeater eingesetzt werden.

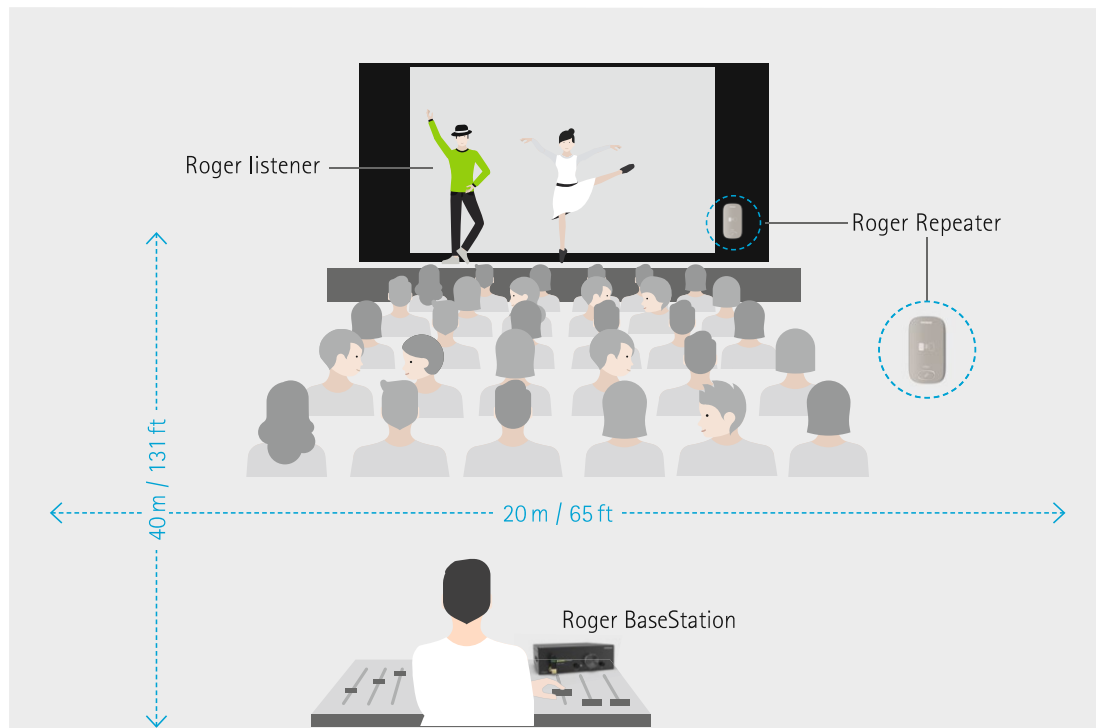

Einstellung in Auditorium/Theatersaal

Beispiel: Schulaufführung, bei der das Soundboard mit einer Roger BaseStation, einem Roger Repeater und einem Zuhörer auf der Bühne verbunden ist.