

Phonak Fast Facts



Phonak Bolero™ B-PR

¿Qué es?

Phonak Bolero B-PR es un audífono retroauricular completamente equipado con una bobina inductiva, control de volumen y una batería recargable integrada, de modo que no es necesario cambiarle las baterías. Bolero B-PR ofrece 24 horas* de duración de batería en una carga única, gracias a la utilización de una batería de iones de litio. Asimismo, el nuevo diseño de la carcasa proporciona una mayor durabilidad con una calificación IP 68 (resistencia al agua y al polvo).

¿Por qué usarlo?

Con las baterías recargables, los usuarios tienen la ventaja de disfrutar de una audición sin molestias, sin necesidad de cambiar baterías ni llevar baterías adicionales. En comparación con otras tecnologías recargables, las baterías de iones de litio tienen la ventaja adicional de un menor deterioro y degradación de la batería con el paso del tiempo, sin que el rendimiento del audífono se vea afectado. Es más, al eliminar la tapa de la batería, se ha mejorado la durabilidad del audífono. Usted también se puede beneficiar al disponer de más tiempo de asesoramiento que pueden dedicar a temas que no están relacionados con el cambio y el mantenimiento de la batería.



¿Cómo se utiliza?

Bolero B-PR es fácil de usar. Simplemente retire los audífonos del cargador y mantenga pulsado el botón pulsador durante 3 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee brevemente en verde. Ahora, los audífonos están activados y listos para usar. Al final del día, solo debe colocar los audífonos en el cargador. Los audífonos encajan en las ranuras y se desactivan automáticamente. El indicador luminoso verde parpadea lentamente para indicar que se está realizando la carga. Una vez que la luz deja de parpadear y permanece fija, los audífonos están completamente cargados y listos para usar. El tiempo de carga para un audífono completamente descargado es de 3 horas.

Para obtener más información sobre Phonak Bolero B-PR y las opciones de carga, visite www.phonakpro.com/bolero-b o póngase en contacto con su representante de Phonak.

*Resultados estimados con carga completa y hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica. Consulte www.phonakpro.com/evidence