

Phonak Fast Facts



Phonak Charger Case

¿Qué es?

El Phonak Charger Case es una opción de carga para los audífonos recargables Phonak Belong™, que también actúa como kit de secado y estuche rígido. Se puede conectar un Power Pack extraíble opcional al Charger Case cuando no haya una fuente de alimentación externa disponible.

¿Por qué usarlo?

Para los clientes que quieren un cargador con las ventajas de cargar, guardar y secar sus audífonos al mismo tiempo, esta es la solución ideal. Al añadir el Power Pack, se dispone de la ventaja adicional de cargar sin tener que utilizar una fuente de alimentación externa durante un máximo de 7 días.

¿Cómo se utiliza?

Para cargar los audífonos, simplemente encájelos en las ranuras de carga del Charger Case y se desactivan automáticamente. El indicador luminoso verde parpadea lentamente para indicar que se está realizando la carga. Una vez que la luz deja de parpadear y permanece fija, los audífonos están completamente cargados y listos para usar. El tiempo de carga para un audífono completamente descargado es de 3 horas.

Cuando no hay fuente de alimentación externa disponible, el Power Pack puede bloquearse en la parte inferior del estuche de carga. Esto proporcionará 7 cargas completas para un par de audífonos recargables Belong. Para recargar el Power Pack, no es necesario extraerlo del Charger Case. Simplemente, conéctelo a una fuente de alimentación externa y los audífonos y el Power Pack podrán cargarse a la vez.



Phonak Charger Case



Phonak Charger Case con el Power Pack conectado

Para obtener más información sobre los audífonos recargables Phonak Belong y las opciones de carga, visite www.phonakpro.com/audeo-b o póngase en contacto con su representante de Phonak.