

Phonak Fast Facts



Phonak Mini Charger

¿Qué es?

El Mini Charger es una opción de carga compacta y pequeña para los audífonos recargables Phonak Belong™. Gracias a su tamaño, ocupa poco espacio y es ideal para utilizarlo como cargador portátil o como cargador de reserva.

¿Por qué usarlo?

Para los clientes que quieren un cargador pequeño, compacto y más adecuado para llevar de un lado a otro, el Mini Charger es la solución ideal.

¿Cómo se utiliza?

Para cargar los audífonos, simplemente encájelos en las ranuras de carga del Mini Charger y se desactivan automáticamente. El indicador luminoso verde parpadea lentamente para indicar que se está realizando la carga. Una vez que la luz deja de parpadear y permanece fija, los audífonos están completamente cargados y listos para usar. El tiempo de carga para un audífono completamente descargado es de 3 horas.



Para obtener más información sobre los audífonos recargables Phonak Belong y las opciones de carga, visite www.phonakpro.com/audeo-b o póngase en contacto con su representante de Phonak.