




はじめに…準備をするもの

1.補聴器


2.充電ケース

はじめに
お読みください

フォナック クイックガイド 耳かけ型 ー入門編ー 充電式RIC(L-R)タイプ

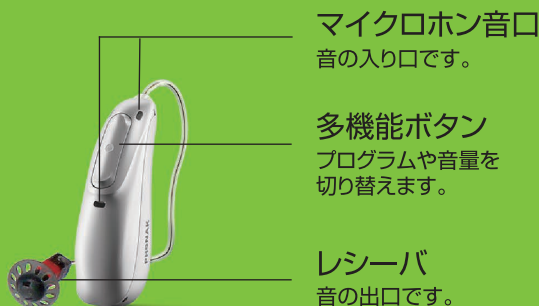

ステップ1 電源を入れてみましょう!

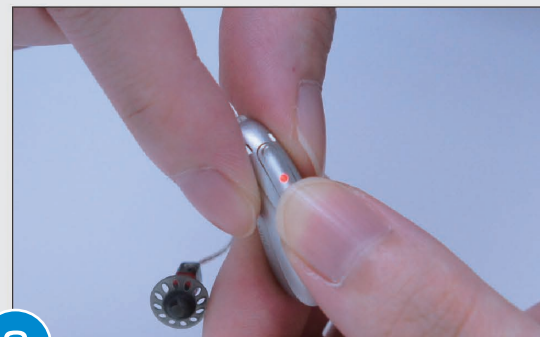


1 レシーバまたは補聴器の後ろ側の赤または青の色と、充電ケースについている赤または青の色を合わせて、補聴器を充電ケースに挿し、充電します。挿し込んだ際にはカチッと磁石でくっつくような感覚があります(3時間でフル充電。補聴器の多機能ボタン中央のLEDランプが点滅から点灯に変われば充電完了です)。

2 充電ケースから補聴器を取り出します。補聴器の多機能ボタン中央のLEDランプが短く緑色に8回点滅して自動的に電源が入ります。


3 電源を切る際は、ボタンの下部を長押し(約3秒間)します(LEDランプが短く1回赤色に点滅します)。電源を再び入れる場合も、ボタンの下部を長押し(約3秒間)します(LEDランプが短く8回緑色に点滅します)。

ステップ2 補聴器を耳につけてみましょう!

【ドーム耳せん編】

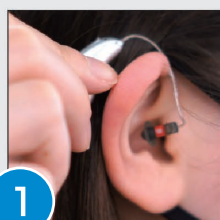

1 補聴器本体を耳にかけます。

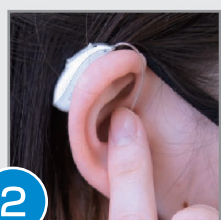

2 レシーバを耳の中に入れ、ストッパーを耳のくぼみ(耳甲介)へ押し入れます。




3 補聴器本体およびストッパーが正しい位置になるようにしてください。


【オーダーシェル編】



1 オーダーシェルの取り出し用テグスを指でつまみます。

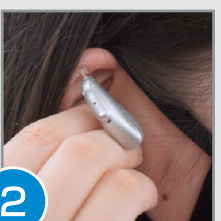


2 オーダーシェルを耳の中に入れます。

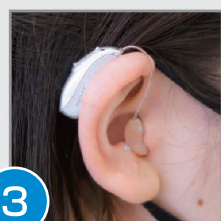


3 補聴器本体を耳にかけます。

取り出す時

ドーム耳せんの場合

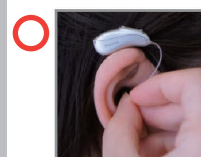


○ レシーバの付け根(ジョイント)部分をつまんで取り外します。

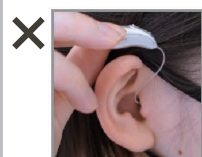

× 補聴器本体を持って外さないでください。

オーダーシェルの場合

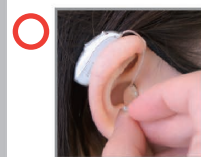

○ オーダーシェルの取り出し用テグスをつまんで取り外します。



× 補聴器本体を持って外さないでください。

ステップ3 使用(練習)してみましょう!



練習1 ひとりで
～3日間

家の静かな場所で補聴器の音に慣れる練習をしてみましょう。



練習2 ふたりで
～1週間

1対1での会話で楽しんでみましょう。



練習3 お部屋で
2週間

テレビやラジオを聴いてみましょう。



練習4 外出先で
～1ヶ月間


色々な音がする外で会話を楽しんでみましょう。

耳かけ型 充電式RICタイプ – お手入れ編 –

お手入れ1


お掃除の仕方

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。

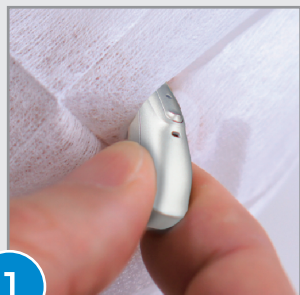

1

柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

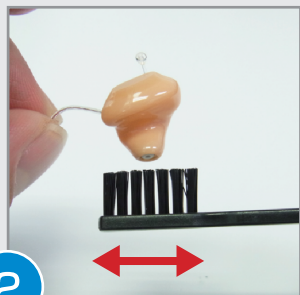

2

耳あなの奥に入る側(補聴器の先端)を下に向けてブラシかけをします。

防水防塵IP68補聴器 ご使用の注意点

IP68を取得した補聴器は、防水・防塵性能を持ちます。防水・防塵性能を維持するために、補聴器の動作の異常の有無に関わらず1年に1度のメーカーによるメンテナンスをおすすめします。

【こんな時には使わないでください】

- × 強い水流や強い水圧がかかるような場合
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティ、洗濯機、超音波洗浄機など)
- × 高温もしくは低温の環境条件の場合
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での保管、ドライヤーの温風)
- × 整髪や散髪の時
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)

お手入れ2


耳垢侵入を防止する部品の交換方法

【セルストップを使用する場合】




1

ケースから交換用セルストップを1本取り出します。
※オーダーシェルをお使いの場合のみ。

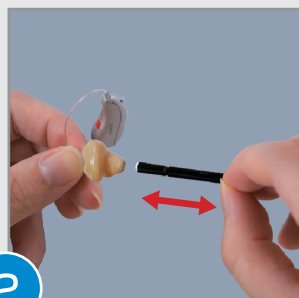


2

交換用セルストップが付いていない側を差し込んでから、手前に引いて古いセルストップを取り外します。

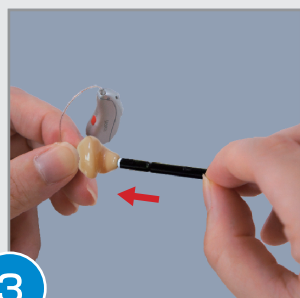


3

新しいセルストップをしっかり奥まで差し込みます。

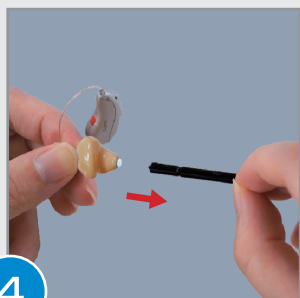


4

ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

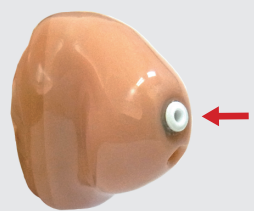

白い部分がセルストップです。

【セルシールドを使用する場合】

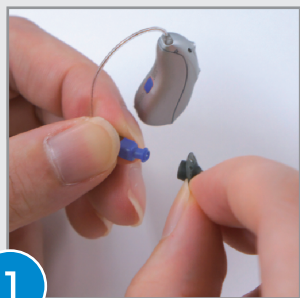

1

はじめに、耳せんをレシーバから取り外します。
※オーダーシェルをお使いの場合はこの作業は不要です。



2

ケースを右に回し"2"の穴に新しいセルシールドが見えるようにします。



3

ケースの"1"の穴にレシーバをしっかりと差し込み、古いセルシールドを取り外します。



4

ケースの"2"の穴にレシーバをしっかりと差し込みます。




5

ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

お手入れ3

保管の仕方

衛生的にも機能的にも補聴器や充電ケースに水分や汚れが付着したまま保管しないように、保管前には水分や汚れを拭き取ってから充電ケースに入れてください。

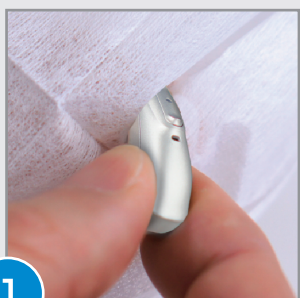

1

柔らかい乾いた素材の布などで補聴器や充電ケースの水分や汚れをふき取ります。



2

蓋をしっかりと閉じます。

【動画】お手入れとメンテナンス方法

補聴器のお手入れとメンテナンスについて、こちらから動画でご覧いただけます。



ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル
TEL:0120-06-4079
(お客様相談窓口 受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080