

マイロジャーマイク アプリ 1.0.2

ユーザーガイド Ver.2



A Sonova brand

PHONAK
life is on

はじめに

マイロジャーマイクは、スイスのチューリッヒに拠点を置く、聞こえのソリューションにおける世界的なトップ企業であるソノヴァが開発したアプリです。本ガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

使用目的

マイロジャーマイク アプリを使用することで、対象機器が手元になくともマイクロホンモードの切り替え、集音方向の変更などを行うことができます。



互換性の情報:

マイロジャーマイク アプリを使用するには、ロジャー ジャー オンまたはロジャー オン iN が必要です (2022年1月現時点)。

マイロジャーマイク アプリは、Bluetooth® Low-Energy (LE)機能を持つスマートフォンで使用でき、iOS® バージョン13以降のiPhoneと互換性があります。

また、マイロジャーマイク アプリはBluetooth® 4.2および Android™ OS 7.0以降をサポートする Google Mobile Services (GMS)認証のAndroid スマートフォンでも使用できます。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

iPhone® は Apple Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

Android™ は Google LLC の商標です。

iOS® は、米国および他の国々で登録された Cisco Systems, Inc. および/またはその関連会社の登録商標または商標です。

目次

はじめに	2
概要	3
アプリのインストール	4
対象機器とのペアリング	5
ペアリングに関するトラブルシューティング	6
リモコン	7
機器の設定	9
複数機器の追加および削除	10
その他の情報	11
安全に関する情報および記号の説明	12

概要



アプリのインストール

- スマートフォンがWiFi またはモバイルデータ通信でインターネットに接続されていることをご確認ください。
- スマートフォンの Bluetooth® がオンになっていることをご確認ください。




アプリのダウンロード

ストアからアプリをダウンロードします。




アプリの起動

ダウンロードされたアプリを開きます。
[次へ]をタップして次の画面に進みます。

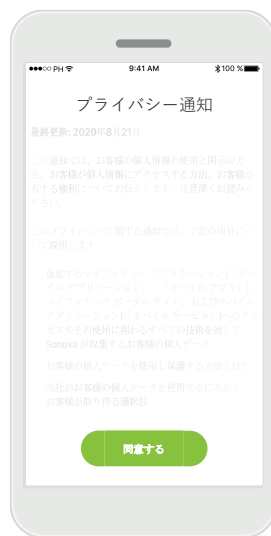

プライバシーに関する通知

操作を続行してアプリを使用するには、[同意する]をタップしてプライバシーに関する通知を受け入れる必要があります。

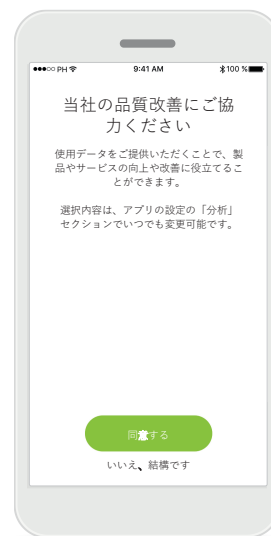

製品の向上

使用データの提供について選択します。提供いただく使用データは、当社製品の品質向上に役に立てさせていただきます。匿名化された使用データをご提供いただく場合は[同意する]をタップしてください。

対象機器とのペアリング

対象機器とマイロジャーマイクアプリをペアリングします。アプリ画面の提示に従ってペアリングを完了してください。



ペアリングの説明
[続ける]をタップし、ロジャーオン/ロジャーオンiNの電源を入れてペアリング操作を行ってください。




探しています
互換性ある機器がアプリ内で検出されません。この処理にはしばらく時間がかかる場合があります。



選択
お使いのロジャーオン/ロジャーオンiNがリストに表示されたら、[選択]をタップしてください。
(複数の機器をアプリとペアリングしたい場合は、P10の「複数機器の追加および削除」をご参照ください。)



ペアリング完了
機器のペアリングが完了しました。アプリは、自動的に次の手順に進みます。

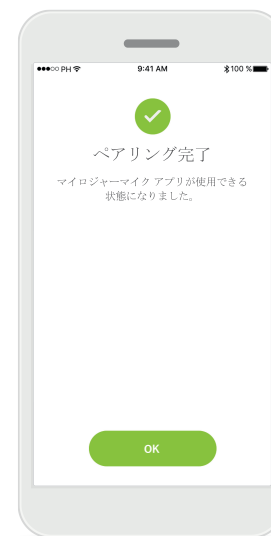

セットアップの完了
これでマイロジャーマイクアプリが使用できる状態になりました。
[OK]をタップすると、リモコン画面が表示されます。

ペアリングに関するトラブルシューティング



ペアリング処理に進まない
スマートフォンのBluetooth
を有効にしてください。

- iOSの場合：[設定画面を開く]をタップしてスマートフォンの設定画面でBluetoothを有効にしてください。
- Androidの場合：[有効にする]をタップして画面の提示に従って次へ進めてください。



接続に失敗

以下のことを確認してからロジャーオン/ロジャーオンiNを再起動してペアリングを再度行ってください。

- ロジャーオン/ロジャーオンiNの電源が入っており、電池残量が十分であること。
- スマートフォンのBluetooth機能が有効になっていること。

画面下部の[原因は?]をタップして解決方法を確認することもできます。



補聴器が検出されません

アプリとペアリングされているロジャーオン/ロジャーオンiNが補聴器とペアリングされていません。画面下部の[原因は?]をタップして解決方法をご確認ください。

リモコン 1/2

リモコンの画面では、ロジャー オン/ロジャー オン iNのマイクロホンモード※の切り替え、集音方向の変更、ミュート/ミュート解除などを行うことができます。



マイクロホンモードの切り替え

使用したいマイクロホンモードをタップすると、そのモードに切り替わります。



集音方向の変更※※

卓上モードでロジャー オン/ロジャー オン iNを使用する場合、アプリを利用して任意の1人または複数の話し手に集中できるようマイクロホンの集音方向を操作することができます。聞きたい方向をタップすると、その集音方向に切り替わります。もう一回タップすると解除されます。



1タッチで全方向に切り替え※※

画面下部の円形アイコンをタップすると、全ての集音方向が有効になります。



ミュート/ミュート解除

1タッチでロジャー オン/ロジャー オン iNをミュート/ミュート解除することができます。

※ 各マイクロホンモードの詳細については、ロジャー オン/ロジャー オン iNの取扱説明書でご確認ください。

※※ この機能は卓上モードでのみ利用可能です。

リモコン 2/2

リモコンの画面では、使用頻度が高いモードをカスタム設定として保存することもできます。



カスタム設定の保存
画面右下の[保存]アイコンをタップすると、現在のモードをカスタム設定として保存することができます。最大2つのカスタム設定を保存することができます。




カスタム名称の作成
作成したカスタム設定に名前を付けて保存します。



カスタム設定へアクセス
リモコン画面のマイクロホンモードの表示欄を右から左にスワイプすると、保存されたカスタム設定が表示されます。



カスタム設定の削除
画面右下の[削除]アイコンをタップすると、選択されたカスタム設定が削除されます。

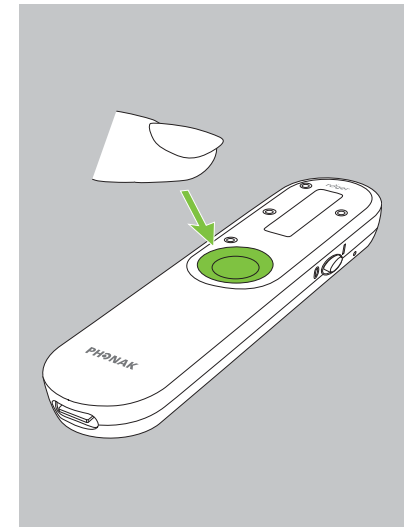

機器本体から呼び出す
ロジャー オン/ロジャー オンiNの機能ボタンを押すことで、アプリで保存されたカスタム設定を機器本体から呼び出すこともできます。

機器の設定

アプリを使用することで、マルチビームテクノロジー 2.0*や範囲拡張機能を有効/無効に設定することができます。



設定にアクセス

左上の[ナビゲーション]→[ロジャー オンの設定]をタップします。




機器の選択

お使いの機器を選択します。



マルチビームテクノロジー 2.0の有効**

この機能を有効にすると、テーブルの中央にロジャー オン/ロジャー オン iNを置いたときに誰がどの方向から話しているのかを把握することができます。また、一度有効にするとお使いのロジャーオン/ロジャーオン iNにこの設定が保存されますので、その都度有効にする必要はありません。

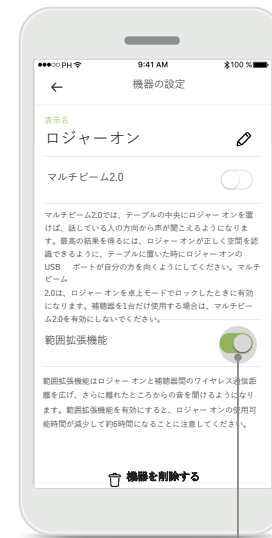

範囲拡張機能の有効***

この機能を有効にすると、ロジャー オン/ロジャー オン iNの使用可能距離が元の25メートルから最大50メートルまで拡張されます（ただし、使用可能時間は元の8時間から約6時間に短縮されます）。


* マルチビームテクノロジー 2.0の詳細については、ロジャーオン/ロジャー オン iNの取扱説明書でご確認ください。ご不明な点がある場合はお買い上げの販売店へお尋ねください。

** この機能は、ロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装着、かつロジャー オン/ロジャー オン iNが卓上モードに固定されている場合のみ利用可能です。

*** この機能は、ロジャーダイレクト対応補聴器でのみ利用可能です。


複数機器の追加および削除

最大10台の対象機器をアプリとペアリングすることができます。

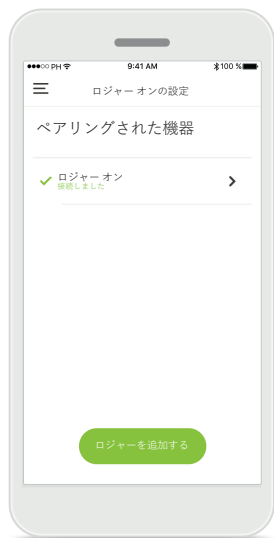


機器の追加

左上の[ナビゲーション] → [ロジャー オンの設定] をタップします。画面下部の[ロジャーを追加する]をタップすると、ペアリング画面が表示されます。画面の提示に従って新しい機器をアプリとペアリングしてください。

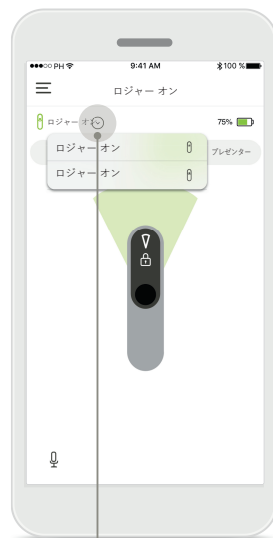

機器の表示

ペアリングが完了しましたら、リモコン画面が表示されます。複数台の機器がアプリとペアリングされている場合、リモコン画面の上部に矢印が表示されます。矢印をタップすると、その下にアプリとペアリングされている機器が全て表示されます。使用したい機器をタップすると、その機器に切り替えることができます。

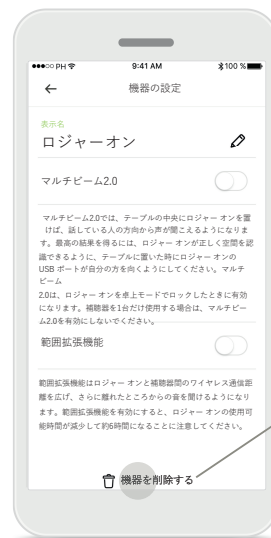

機器の削除

[ナビゲーション] → [ロジャー オンの設定] → 削除したい機器を選択 → 機器の設定画面にアクセスします。画面下部の[機器を削除する]をタップして機器を削除することができます。



その他の情報

ロジャー オン/ロジャーオン iNは、ロジャー テーブルマイクIIやその他のロジャー マイクロホンと組み合わせることができます*。
ロジャー オン/ロジャーオン iNを他のロジャー マイクロホンと組み合わせて使用する場合、アプリでは以下の画面が自動的に表示されます。





他のロジャーマイクロホンと接続されている場合
リモコン画面では、**[マルチトーカーネットワーク]**の提示が表示されます。


ロジャーオン/ロジャーオン iNがミュートされた場合
リモコン画面では、**[このロジャーはミュートになっています]**の提示が表示されます。
[原因は?]をタップしてミュートされた原因および解除の方法を確認することができます。


ロジャー オン/ロジャーオン iNがブロックされた場合
リモコン画面では、**[ロジャーがブロックされています]**の提示が表示されます。
[原因は?]をタップしてブロックされた原因および解除の方法を確認することができます。


安全に関する重要な情報


 個人のスマートフォンの使用に関する責任は、ユーザーにあります。スマートフォンおよびアプリは慎重に扱うようお願いします。

 マイクロホンモードを切り替えたり、集音方向を変更したりすると、警告や安全性関連の信号が聞こえにくくなる場合があります。それにより危険な状況につながる可能性があります。


 過度な磁場の障害によりロジャー オン/ロジャー オン iNが機器に反応しない場合は、その強い磁場から離れてください。


 機器が反応しない場合は、ロジャー オン/ロジャー オン iNの電源が入っているか、電池残量が十分であるか、標準のBluetooth LE 接続の範囲にいるかを確認してください。


 ロジャー オン/ロジャー オン iNをアプリと接続するには、Bluetooth を有効にする必要があります。


 補聴器を片耳のみ装用する場合は、マルチビームテクノロジー 2.0を有効にしないでください。補聴器の効果を低下させる可能性がありますので、ご注意ください。

記号の説明

 この記号は、本ガイドの関連情報を読んで考慮することの重要性を示しています。

 この記号は、ユーザーが本ガイドの関連する警告内容に注意を払うことの重要性を示しています。

 製品の安全性および取り扱いに関する重要な情報です。

 CE マークにより、このフォナック製品が無線機器指令2014/53/EUの要件を満たしていることを Sonova AG は表明します。CE マークは、2020年に取得しました。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com