

# アイキューブⅡの設定方法

アイキューブⅡ専用アダプターを使用したペアリング方法

Ver.2

アイキューブⅡはフィッティング時に必要となるケーブル接続が不要なワイヤレス接続機器です※。ワイヤレスだけでなく、USB ケーブルによる有線での使用も可能です。

アイキューブⅡは、**ペアリングされた状態で出荷されているので、再度ペアリングする必要はありません。**

ペアリングが外れてしまったり、再度ペアリングをする必要がある場合は、次の方法でペアリングを行ってください。ペアリングの前に、あらかじめ、お使いのパソコンのUSBポートにアイキューブⅡ専用USBアダプタを差しておいてください。  
(アイキューブⅡと同梱されています)




アイキューブⅡ

※ スパイスシリーズ～ピロングシリーズまでのワイヤレス通信を持つ補聴器とのみ使用が可能

## 1. Phonak Target を起動します。

下段メニューの【トライアルとツール】を選択し、左項目から【機器のペアリング】をクリックします。

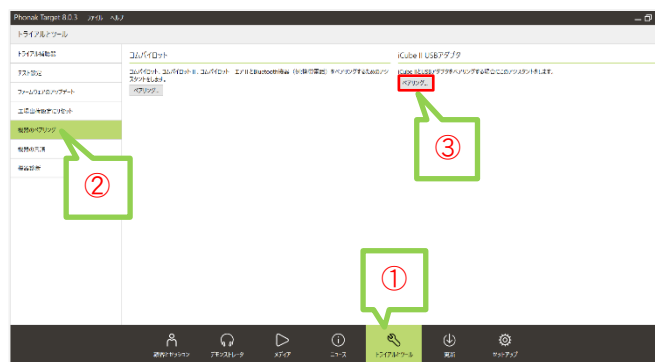


## 2. iCube II USB アダプタの【ペアリング…】をクリックし、ペアリングアシスタントを起動します。

USB アダプターが USB ポートに正しく挿入されているか確認し【続行】を押します。



アイキューブⅡ専用USBアダプター

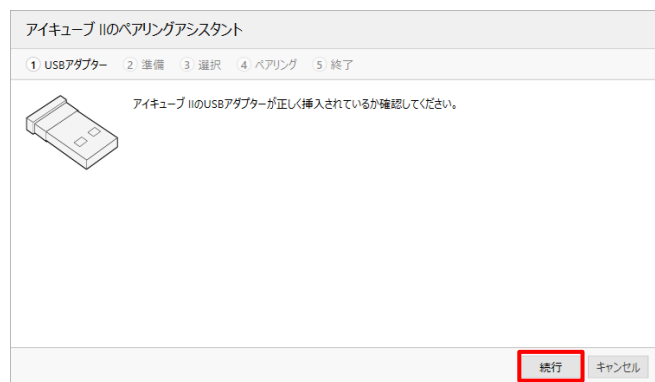


## 3. 3つのLEDランプが点滅するまで、アイキューブⅡのペアリングボタンを長押しします（右図参照）。

ペアリングモードになったらペアリングボタンから手を離し【続行】を押します。



4. アイキューブ II を検出中です。  
 ペアリングしたいアイキューブ II をクリックして選択し  
**【続行】**を押します。ペアリングされると**“接続に成功しました”**と表示されます。

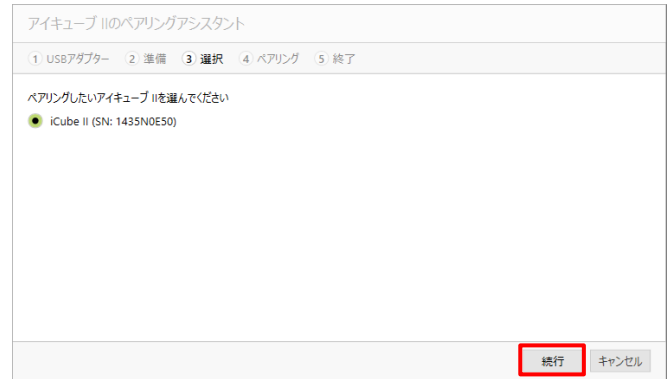

ペアリング作業が完了したら、アイキューブ II が正しく接続されているか確認します。下段メニューの**【セットアップ】** > **【フィッティング機器】** > **【iCube】**を開きます。画面中央の **チェック** をクリックします。正しくペアリングされていれば、**【“アイキューブ II 専用の USB アダプター”を経由】** にシリアル番号と マークが表示されます。

▶ **【全ての接続】** をクリックすると、アイキューブ II の接続状態が接続方法別に表示されます：

- ① USB ケーブルを経由      ② iCube II USB アダプタを経由      ③ 別の Bluetooth アダプタを経由

