




はじめに お読みください

フォナック クイックガイド

耳かけ型 ー入門編ー 充電式・RIC (RL)タイプ

■はじめに…準備をするもの

1.補聴器

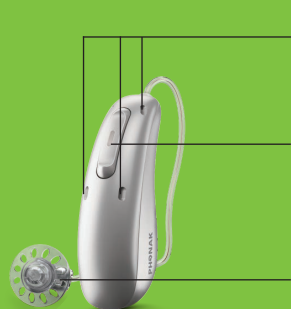

マイクロホン音口
音の入り口です。

多機能ボタン
プログラムや音量を切り替えます。

レシーバ
音の出口です。

2.充電ケース

(チャージャーケース Go または ライフ チャージャー)



補聴器挿入口
ここに挿して充電します。

ステップ1 電源を入れてみましょう!




1

補聴器を充電ケースに挿し、充電します。
(3時間でフル充電。補聴器のランプが点滅から点灯に
変われば充電完了です。)



2

充電ケースから補聴器を取り出します。
この時点で自動的に電源が入ります。

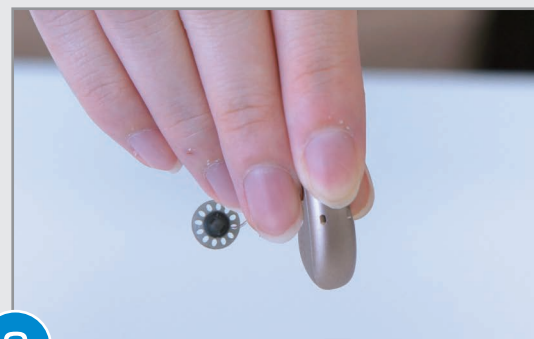


3


電源を切る時は、ボタンの下部を長押し(約3秒間)します。
電源を再び入れる場合も、ボタンを長押し(約3秒間)します。
電源が入ると、スイッチが一瞬光ります。

ステップ2 補聴器を耳につけてみましょう!


【ドーム耳せん編】

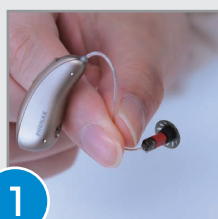


1
レシーバの付け根
(ジョイント)部分を
摘まみます。

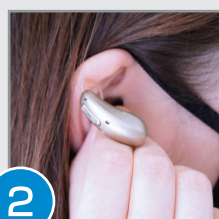

2
レシーバを耳の中
に入れます。

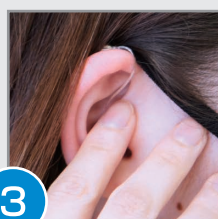


3
補聴器本体を耳にかけ、
ストッパーを耳のくぼみ
(耳甲介)へ押し入れます。

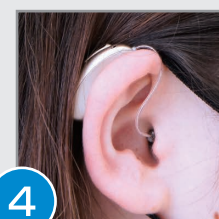


4
補聴器本体およびストッ
パーが正しい位置にな
るようにしてください。


【オーダーシェル編】

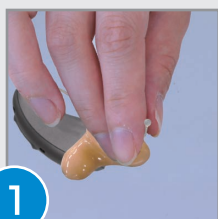

1
オーダーシェルの
取り出し用テグスを
指で摘まみます。

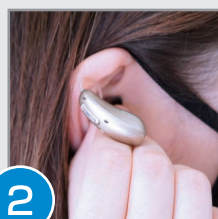

2
オーダーシェルを
耳の中に入れます。

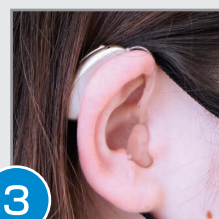

3
補聴器本体を耳にかけます。

取り出す時

ドーム耳せんの場合




レシーバの付け根(ジョイ
ント)部分を摘まんで取り
外します。



補聴器本体を持って
外さないでください。

オーダーシェルの場合

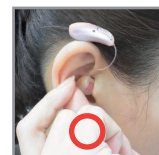

オーダーシェルの取り出し
用テグスを摘まんで取り外
します。



補聴器本体を持って
外さないでください。

ステップ3 使用(練習)してみましょう!



練習1 ひとりで
～3日間

家の静かな場所で
練習してみましょう。



練習2 ふたりで
～1週間

1対1での会話で
楽しんでみましょう。



練習3 お部屋で
2週間

テレビやラジオを
聴いてみましょう。



練習4 外出先で
～1ヶ月間


色々な音がする外で会話を
楽しんでみましょう。

耳かけ型 充電式RICタイプ –お手入れ編–

お手入れ1


お掃除の仕方

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。

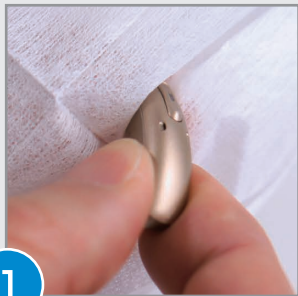

1

補聴器クリーナー又は柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

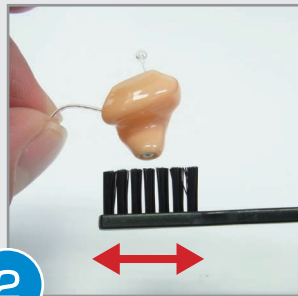

2

耳あなの奥に入る側(補聴器の先端)を下に向けてブラシかけをします。

完全防水*(ウォータープルーフ)・IP68補聴器 ご使用の注意点

完全防水*やIP68を取得した補聴器は防水性能を持ちます。この性能を維持するために、補聴器の動作の異常の有無に関わらず1年に1度のメーカーによるメンテナンスをおすすめします。

【こんな時には使わないでください】


- × 潜水するようなアクティビティ(水中ダイビングなど)
- × 強い水流や強い水圧がかかるような場合
(洗濯機、超音波洗浄機、強い水圧のシャワー、ジェットスキーなど)
- × 高温もしくは低温の環境条件の場合
(サウナでの使用、車内に放置しておく、ドライヤーの温風、冷蔵庫の中で保管など)
- × 整髪や散髪の時
(石鹸やシャンプーまたは整髪料やヘアスプレーの付着など)

*水深最大50cmまで

お手入れ2


耳垢侵入を防止する部品の交換

【セルストップを使用する場合】

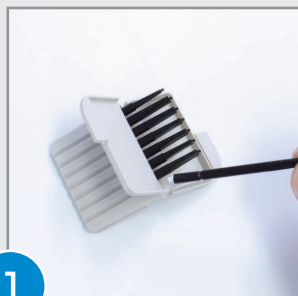


1

ケースから交換用セルストップを1本取り出します。
※オーダーシェルをお使いの場合のみ。

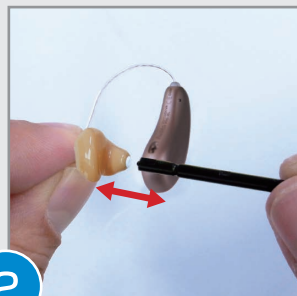


2

交換用セルストップが付いていない側を差し込んでから、手前に引いて古いセルストップを取り外します。

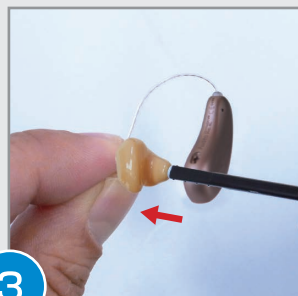

3


新しいセルストップをしっかり奥まで差し込みます。

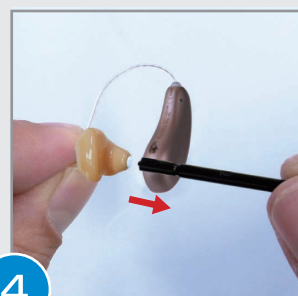

4

ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

【セルシールドを使用する場合】

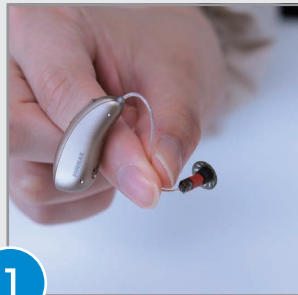

1

はじめに、耳せんをレシーバから取り外します。
※オーダーシェルをお使いの場合はこの作業は不要です。




2

ケースを右に回し"2"の穴に新しいセルシールドが見えるようにします。



3

ケースの"1"の穴にレシーバをしっかりと差し込み、古いセルシールドを取り外します。

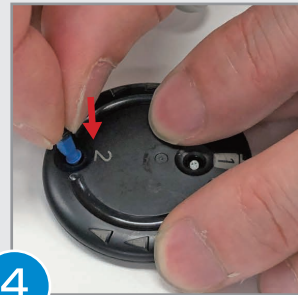

4

ケースの"2"の穴にレシーバをしっかりと差し込みます。




5

ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

お手入れ3

保管の仕方

衛生的にも補聴器に水分が付着したまま保管しないように、保管前には汚れを拭き取ってから充電ケースに入れてください。

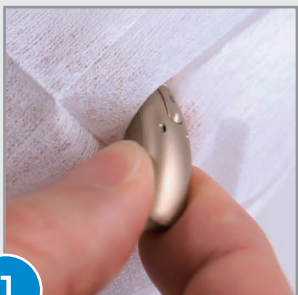

1

補聴器クリーナー又は柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。



2

蓋をしっかりと閉じます。

ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル
TEL:0120-06-4079
(お客様相談窓口 受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080