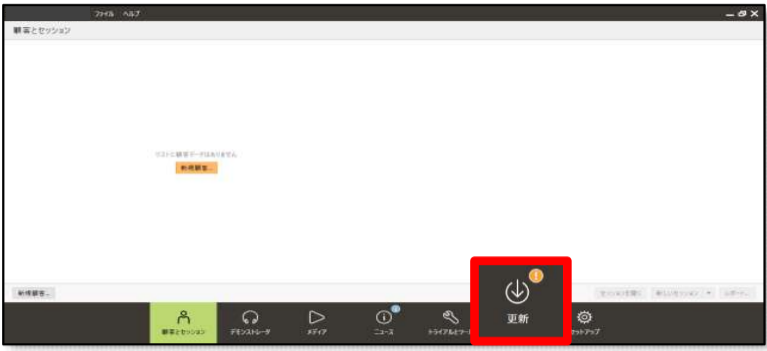


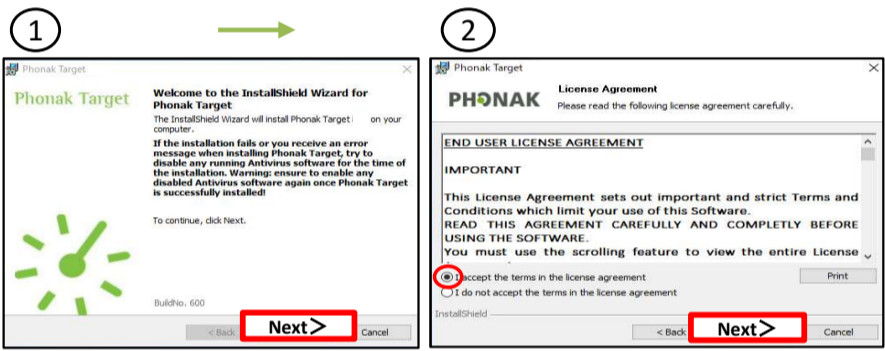
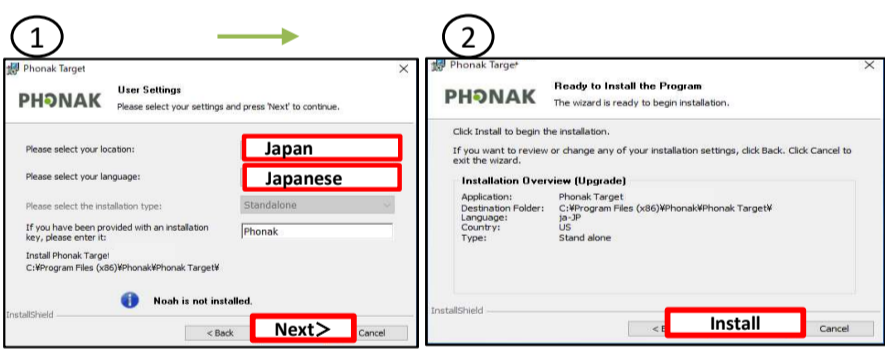
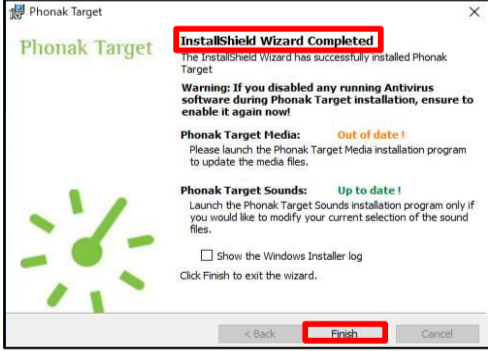



Phonak Target オンラインアップデート ガイド

※インストールに必要なシステム要件は、Targetインストールガイドをご覧ください。（Windows XP/Vista/7/8/8.1はインストール不可）

Phonak Target 9.0は、Windows 8.1でのサポートは終了となります。Windows10以降でインストールをお願いいたします。

| | | |
|---|--|---|
| 1 |  | <p>ダウンロードするソフトがある場合 【更新】の右上に  マークが表示されます。 PhonakTargetが初期設定の状態であればダウンロードは自動で行われます。</p> <p>[セットアップ] > [インターネット] > [バックグラウンドでダウンロード]の <input checked="" type="checkbox"/> を外すことで、ダウンロードをマニュアル操作に変更できます。</p> |
| 2 |  | <p>ダウンロードが終了すると、表示が[キャンセル]から[インストール]に変わるのでクリックします。</p> <p>インストーラーが起動するので、アナウンスに従いPhonak Targetを閉じて進めていきます。</p> |
| 3 |  | <p>左図の事項が順に表示されますので、こちらもアナウンスに従い進めていきます。</p> <p>②は[I accept the terms in the license agreement]を選択します。</p> |
| 4 |  | <p>左図の事項が順に表示されますので、こちらもアナウンスに従い進めていきます。</p> <p>①はソフトを使用する国および言語となります。 [Japan]、[Japanese]に変更しクリックします。</p> <p>インストール完了まで少し時間がかかります。</p> |
| 5 |  | <p>インストールが終了すると、「Installshield Wizard Completed」と完了画面が表示されます。 Finish をクリックすると終了します。</p> |
| 6 |  | <p>インストール終了後、Phonak Targetを立ち上げます。 【更新】 ページには「ソフトウェアは最新版です」と表示されません。</p> |