

アクセサリー ファームウェアアップグレーダー

2024 年 1 月

アップデート手順書

本ソフトは、補聴器専門家がアクセサリーのファームウェアをアップデートすることを目的としています。本書では、ソフトウェアのダウンロード～アップデートまでの手順を紹介しています。

お使いいただく前に・・・

- ※ ソフト画面に表示される機器は **Phonak Target** 内で表示されるアクセサリーファームウェアアップグレーダーと同じものとなっております。

本ソフトは、**Target** 内で利用できるファームウェアアップグレーダーよりも新しいバージョンがリリースされた場合にご利用いただくものとなっております。その後、新しい **Phonak Target** がリリースされましたら、次は **Target** 内でファームウェアをアップグレードすることが可能となります。

ファームウェアアップグレーダー ダウンロード方法：

聴覚専門家のかた向けページよりソフトウェアをダウンロードしていただくことが可能です。

<https://qr.paps.jp/aK5PF>

アクセス先：

Phonakpro ホームページ>サポート>ワイヤレスアクセサリー>アクセサリーファームウェアアップグレーダー (旧チャージャーケース Go アップグレーダー)

- ① ダウンロード：ファームウェアアップグレーダーの項目にある赤色矢印の【Zip】ボタンをクリックし、ソフトウェアをダウンロードします。

- ② ダウンロードされたフォルダを解凍します。





ファームウェアアップグレーダー インストール方法：

① 解凍したフォルダ内の  **setup.exe** ファイルを開きます。



名前	状態	更新日時
conf	✓	2024/01/
ISSetupPrerequisites	✓	2024/01/
1031.mst	✓	2024/01/
1033.mst	✓	2024/01/
1034.mst	✓	2024/01/
1036.mst	✓	2024/01/
Autorun.inf	✓	2024/01/
Data1.cab	✓	2024/01/
setup.exe	✓	2024/01/
SonovaFirmwareUpgrader.msi	✓	2024/01/

② **【Next】** をクリックして進みます。


【I accept the terms in the license agreement】 を選択し、**【Next】** をクリックして進みます。

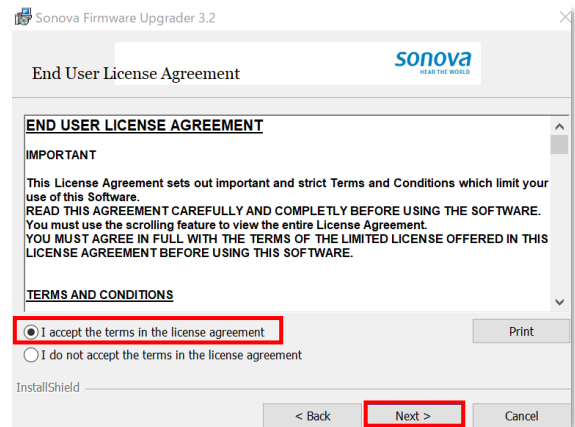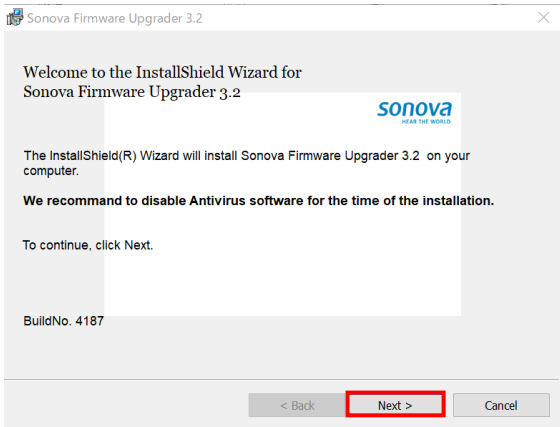

③ **【Install】** をクリックし、インストールを実行します。インストールが完了すると **【Finish】** ボタンが表示されます。

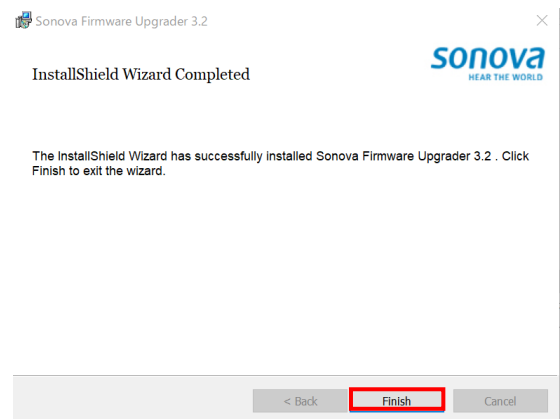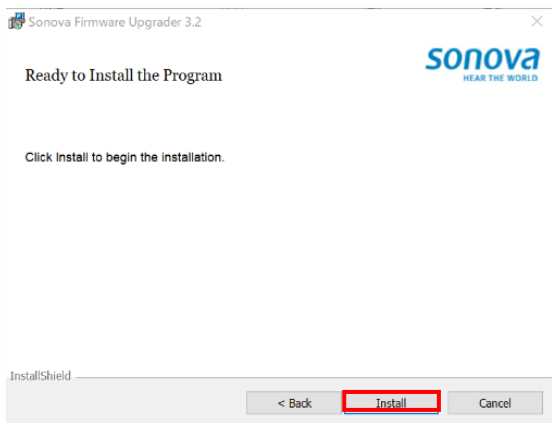

④ デスクトップに右図のショートカットファイルがあるか確認します。以前、チャージャーケース Go をアップグレードするために「TV Connector Upgrader」インストールしたことがある場合、既存ショートカットファイルが「Sonova Firmware Upgrader」と名称を変えて上書きされます。

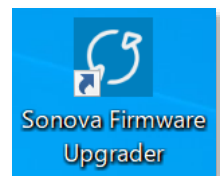

ソフトウェア起動は本アイコンをダブルクリックして実行します。

デスクトップに見当たらない場合：

次の手順でソフトウェアを起動します。

Windows (C:) > Program Files (x86) > Sonova > Sonova Firmware Upgrader > Sonova Firmware Upgrader.exe

テレビコネクタ-D アップデート手順：

① PC にインストールしたソフトウェアをダブルクリックして起動します。



② 右のような画面が表示されます。



③ 同梱されているケーブルを使い、アップグレードしたい製品と PC を接続します。

- ※ 接続の際、**No data** とシールが付いている充電専用ケーブルは使用しないでください。
- ※ PC の USB ポートへ差し込む際、PC へ直接差し込んで読み取るようにしてください（ハブでは反応しない場合があります）。



【Update】 をクリックして、アップデートを実行します。

④ アップデートが完了すると **【Successfully updated!】** と表示されます。

画面右上の×マークをクリックして閉じます。



ファームウェアが既に最新の場合：

【Already up to date!】 と表示されます。
この場合はアップデート不要です。

