

## チャージャーケース Go アップデート

2024 年 1 月

### アップデート手順書

本ソフトは、補聴器専門家がチャージャーケース Go のファームウェアをアップデートすることを目的としています。本書では、ソフトウェアのダウンロード～アップデートまでの手順を紹介しています。

### お使いいただく前に・・・

- ※ ソフト画面に表示される機器は Phonak Target 内で表示されるアクセサリーファームウェアアップグレーダーと同じものとなっております。

本ソフトは、Target 内で利用できるファームウェアアップグレーダーよりも新しいバージョンがリリースされた場合にご利用いただくものとなっております。その後、新しい Phonak Target がリリースされましたら、次は Target 内でファームウェアをアップグレードすることが可能となります。

### ファームウェアアップグレーダー ダウンロード方法：

聴覚専門家のかた向けページよりソフトウェアをダウンロードしていただくことが可能です。

<https://qr.paps.jp/aK5PF>

アクセス先：

Phonakpro ホームページ>サポート>ワイヤレスアクセサリー>アクセサリーファームウェアアップグレーダー (旧チャージャーケース Go アップグレーダー)

- ① ダウンロード：ファームウェアアップグレーダーの項目にある赤色矢印の【Zip】 ボタンをクリックし、ソフトウェアをダウンロードします。
- ② ダウンロードされたフォルダを解凍します。




## ファームウェアアップグレーダー インストール方法：

① 解凍したフォルダ内の  **setup.exe** ファイルを開きます。



名前	状態	更新日時
conf	✓	2024/01/
ISSetupPrerequisites	✓	2024/01/
1031.mst	✓	2024/01/
1033.mst	✓	2024/01/
1034.mst	✓	2024/01/
1036.mst	✓	2024/01/
Autorun.inf	✓	2024/01/
Data1.cab	✓	2024/01/
<b>setup.exe</b>	✓	2024/01/
SonovaFirmwareUpgrader.msi	✓	2024/01/

② **【Next】** をクリックして進みます。


**【I accept the terms in the license agreement】** を選択し、**【Next】** をクリックして進みます。

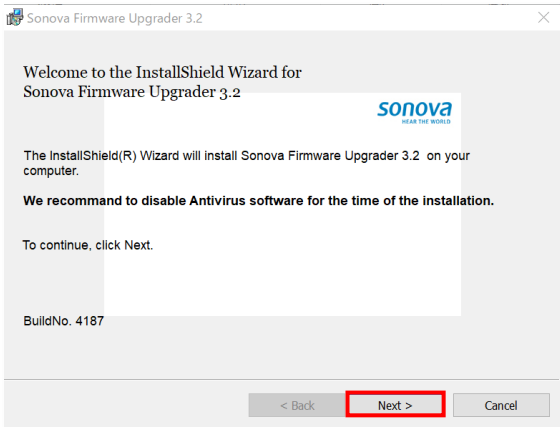

③ **【Install】** をクリックし、インストールを実行します。インストールが完了すると **【Finish】** ボタンが表示されます。

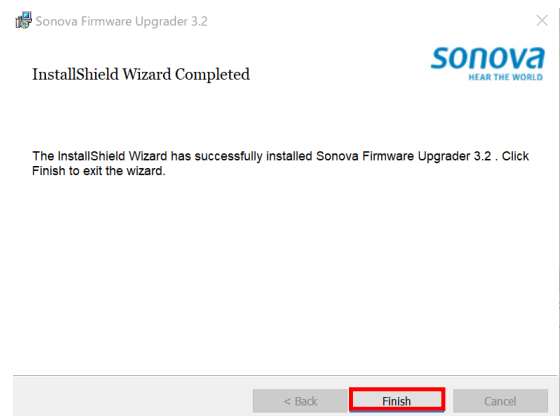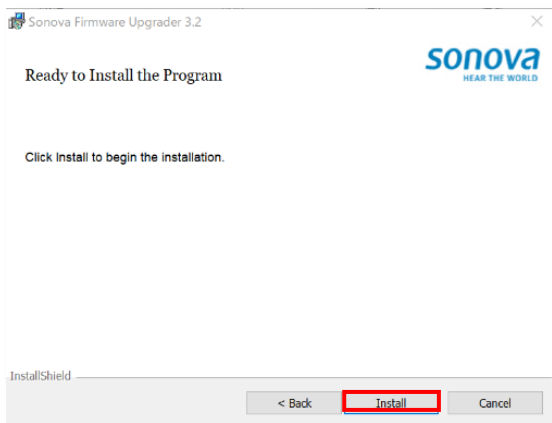

④ デスクトップに右図のショートカットファイルがあるか確認します。以前、チャージャーケース Go をアップグレードするために「TV Connector Upgrader」インストールしたことがある場合、既存ショートカットファイルが「Sonova Firmware Upgrader」と名称を変えて上書きされます。

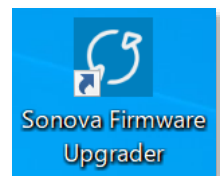

ソフトウェア起動は本アイコンをダブルクリックして実行します。

### デスクトップに見当たらない場合：

次の手順でソフトウェアを起動します。

Windows (C:) > Program Files (x86) > Sonova > Sonova Firmware Upgrader > Sonova Firmware Upgrader.exe

## チャージャーケース Go アップデート手順：

① パソコンにインストールしたソフトウェアをダブルクリックして起動します。



② 右のような画面が表示されます。



③ チャージャーケース Go に同梱されている USB-C ケーブルを使い、充電器をパソコンと接続します。

【Update】をクリックして、アップデートを実行します。

アップデート中は充電器の LED お知らせランプの一番下が「赤緑赤緑…」と点滅します。



④ これでアップデートは完了です。  
画面右上の×マークをクリックして閉じます。



ファームウェアが既に最新の場合：

【Already up to date!】と表示されます。

この場合はアップデートは不要です。

