



röger

COVID-19 ロジャー製品取扱ガイド

ロジャー製品の消毒について



A Sonova brand

PHONAK
life is on

教室で使用するロジャー製品の消毒に関する推奨事項

はじめに

本ガイドでは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関連した固有状況におけるロジャー製品の衛生的な使用方法についてご紹介します。

これからご紹介する方法は、ユーザー間でロジャー製品を一緒に使用する学校教室などにおすすめです。コロナウイルスは、感染者の咳やくしゃみによる飛沫感染や、唾液や鼻水による接触感染で広がる呼吸器系ウイルスです。

（参考：<https://www.who.int/health-topics/coronavirus>）

ロジャーマイクロホンのような、手で持ったり装用したりできる製品を複数のユーザー間で共有することは、人から人へとウイルスの粒子を運ぶ危険を引き起こす可能性があります。健康な人でさえ、気付くことなくコロナウイルスに感染します。そのため、ユーザーが替わる時には衛生的な使用項目に沿ってお使いいただくことを強く推奨します。

対象製品

本ガイド内容は、コロナウイルス流行のリスクを下げることを目的に、ユーザー間で共有して使用することが多い、次のロジャー製品に対して推奨します。

- ロジャー タッチスクリーン マイク
- ロジャー パスアラウンド マイク
- ロジャー マルチメディア ハブ

消毒剤の選び方

金属やプラスチックを腐食する材料を用いた消毒剤は、製品にダメージを与える可能性があります。

漂白剤やエタノールを避け、できる限りノンアルコール系の消毒剤を用いてください。ノンアルコール系の消毒剤が手に入らない場合は、70%イソプロパノール含有の消毒材をお勧めします。

スプレー噴霧は、不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があるため推奨しません。

洗浄に関する重要なルール

- 消毒剤は供給元の指示（接触時間・使用後の乾拭き・乾燥時間など）に従い使用してください。
- 消毒剤で濡らしたタオル等を使って機器を拭いてください。
- スプレータイプの消毒剤は、直接機器に使用しないでください。また、機器を消毒剤に浸すという行為も行わないでください。
- 電子部品に損傷を与える可能性があるため、マイクロホンなどの開放部分に液体が触れないようにご注意ください。
- 消毒剤を使って機器を拭く際は、機器が濡れている状態でボタンを押さないでください（液体が内部に侵入するのを防ぐため）。

免責事項

Sonovaは、顧客とロジャー製品ユーザーに本ガイドを提供するため推奨事項を発行します。Sonovaは、上記の推奨事項の実施に起因するいかなる損害についても責任を負いません。アルコールを使用した消毒剤は、機器のコーティングや繊細な電子機器に損傷を与える可能性があります。

Life is on

私たちフォナックは、「よく聞こえること」は最大限に人生を生きるためには不可欠だと信じています。私たちは人々の生活を変える聴覚ソリューションを社会的で感情的に成長させる開発の先駆者として、70年以上にわたり使命に忠実に向き合い続けてきました。

豊かな人生のために、さあ Life is on!

www.phonak.com

