



마블 보청기를 마이포낙 앱에 연결하는 방법


- 1 구글플레이™ 또는 앱 스토어®에서 마이포낙 앱을 다운로드합니다.

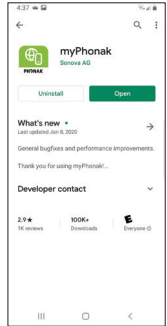

- 2 앱을 열고, 보청기를 재시작합니다.

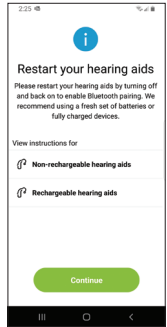

- 3 보청기를 선택합니다.

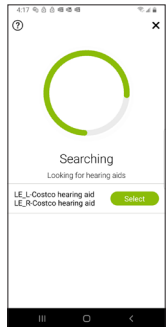

- 4 청각전문가에게 문의하여 원격 세션이 가능한 시간을 예약합니다.


Google Play is a trademark of Google LLC.
App Store is a service mark of Apple Inc.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

원격 지원 세션 사용 방법


5 원격 지원을 시작하려면, 오른쪽 상단에 있는 세줄을 누르십시오.

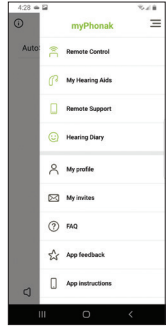

6 "원격 지원"을 누르십시오.

7 "시작"버튼을 누르면, 청각전문가를 찾습니다.

주의사항 : 이미 청각전문가와 예약 시간을 정하셨을 겁니다. 이미 정해진 약속시간이 있을 때만 사용 가능합니다.

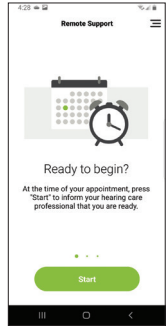

8 청각전문가와 화상 채팅

