

로저 호환성 가이드

로저(Roger)는 시끄러운 소음 상황(식당, 카페 등)이나 비즈니스 미팅 등에서 더 나은 어음명료도를 제공합니다.

로저를 사용하기 위해서는 반드시 아래의 구성요소를 갖추어야 하며,

로저 송신기는 청취 목적에 따라 선택할 수 있지만, 로저 수신기는 청각 보조기기에 따라 호환되는 제품을 사용해야 합니다.

로저 시스템 구성요소



청각 보조기기
: 보청기, 인공와우, Baha



로저 송신기
: 로저 온, 로저 셀렉트, 로저 펜 등



로저 수신기
: 로저 X, 로저 넥루프, 로저 다이렉트* 등

* 로저 다이렉트란?

: 로저 설치 과정을 통해 로저 iN 송신기와 포낙의 무선 다이렉트 보청기를 직접 연결할 수 있는 기능

→ 로저 다이렉트 기능이 탑재된 제품: 루미티, 파라다이스, 마블 (단, 비르토 티타늄, 비르토 10-NW O, 비르토 312-NW O 제외)

1. 로저 송신기 종류

로저 송신기	로저 iN 송신기			로저 송신기		교육용 송신기
	로저 온 iN	로저 셀렉트 iN	로저 펜 iN	로저 셀렉트	로저 펜	로저 터치스크린 마이크
특징	수신기 2개가 내장되어 있는 송신기 (로저 송신기와 디자인은 동일하나, '설치 버튼'이 있음)			로저 수신기가 반드시 필요		

2. 로저 수신기 종류

1) 범용 수신기: 모든 제조사의 보청기 및 인공와우와 호환되는 수신기

범용 수신기	로저 X	로저 넥루프	(구) 로저 마이링크
사용 방법	액세서리(스트리머 / 예. 컴파일럿) 혹은 어댑터에 꽂아서 사용	목에 걸어서 사용, 청각 보조기기에 텔레코일이 탑재되어 있어야 함	

2) 인공와우 일체형 수신기: 인공와우의 메인 어음처리기에 부착해서 사용하는 일체형 수신기

	로저 14	로저 17	로저 20	로저 21
인공와우 일체형 수신기				
호환되는 인공와우	Cochlear사 Nucleus 5,6	Advanced Bionics사 Naida CI	Cochlear사 Nucleus7	Med-EL사 Sonnet

3) 포낙 일체형 수신기: 포낙 보청기에 '설치' 혹은 귀걸이형 보청기에 '부착'해서 사용하는 일체형 수신기

	로저 다이렉트	로저 18	로저 19
포낙 일체형 수신기			
호환되는 보청기	로저 다이렉트 기능이 탑재된 루미티, 파라다이스, 마블 보청기 (다음 페이지 참고)	스카이 B-P, 스카이 B-SP, 나이다 B-SP	스카이 B-UP, 나이다 B-UP, 비투스+ BTE-UP, 비투스 BTE-UP

* 로저 송신기 & 수신기 호환성은 아래의 링크에서 확인이 가능합니다.

: <https://www.phonak.com/en-int/roger-configurator>

3. 로저 다이렉트 사용 시, 로저 송/수신기 호환성

① iN 수신기 (로저 iN 송신기에 내장된 로저 수신기를 의미)

: 로저 iN 송신기에 내장된 로저 수신기를 보청기에 설치(설치 과정에 대한 자세한 내용은 '로저 iN 송신기 설치 가이드'를 참고)

② 로저 X & 인스톨러

: 로저 인스톨러를 이용하여 로저 X 수신기를 보청기에 설치(설치 과정에 대한 자세한 내용은 '로저 인스톨러 & 로저 X 설치 가이드'를 참고)

		로저 iN 송신기 로저 온 iN, 로저 셀렉트 iN, 로저 펜 iN	로저 송신기 로저 셀렉트, 로저 펜	교육용 송신기 로저 터치스크린마이크
로저 다이렉트	iN 수신기*	●		
	로저 X & 인스톨러	●	●	●

4. 포낙보청기 사용 시, 로저 수신기 호환성

루미티, 파라다이스, 마블 보청기와 호환되는 로저 수신기는 로저 다이렉트와 로저 넥루프(혹은 로저 마이링크)입니다.

: 루미티 : 파라다이스 : 마블

형태	제품명	로저 수신기		
		로저 다이렉트		로저 넥루프 (혹은 로저 마이링크)
		iN 수신기	로저 X & 인스톨러	
오픈형	슬림 L	●	●	
	오데오 L-R 오데오 L-RL	●	●	
귀걸이형	나이다 L-PR	●	●	
	나이다 L-UP	●	●	●
	스카이 L-PR	●	●	
	스카이 L-UP	●	●	●
귓속형	비르토 P-T 비르토 P-10 NW O 비르토 P-312 NW O			● 보청기에 T-coil 옵션 추가
	비르토 P-312	●	●	
오픈형	오데오 P-R 오데오 P-RL 오데오 P-R Fit 오데오 P-312	●	●	
	오데오 P-13T	●	●	●
귀걸이형	나이다 P-PR	●	●	
	나이다 P-UP	●	●	●
귓속형	비르토 M-T 비르토 M-10 NW O 비르토 M-312 NW O			● 보청기에 T-coil 옵션 추가
	비르토 M-312	●	●	
오픈형	오데오 M-R 오데오 M-312	●	●	
	오데오 M-13T	●	●	●
귀걸이형	나이다 M-SP	●	●	●
	스카이 M-M	●	●	●
	스카이 M-PR	●	●	
	스카이 M-SP	●	●	●