

귀자 측정 가이드

오픈형 및 귀걸이형 보청기 사용자는 각 개인의 귀에 맞는 리시버 및 슬림 튜브를 착용해야 합니다.

리시버 및 슬림 튜브의 길이를 잘못 측정할 경우, 보청기 착용에 어려움이 발생할 수 있으며 분실 가능성이 높아질 수 있습니다.


1. 귀자 측정이 필요한 경우

1) 오픈형 보청기: 리시버(0번, 1번, 2번, 3번)

2) 귀걸이형 보청기: 슬림 튜브(00번, 0번, 1번, 2번, 3번)



2. 귀자 측정 방법

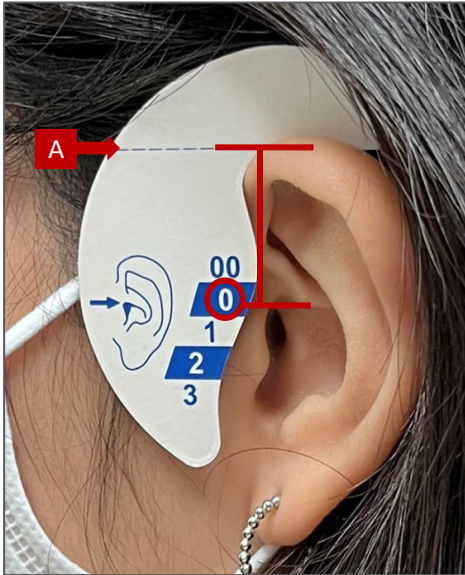


▲ 왼쪽 귀자 측정: 0번 리시버

1. 귓바퀴가 잘 보이도록 머리카락을 넘깁니다.
2. 측정할 귀에 해당하는 색상이 보이도록 귀자를 잡습니다.
(왼쪽 귀: 파란색, 오른쪽 귀: 빨간색)
3. 귀자를 귀에 걸고 점선(A)이 수평이 되도록 고정시킵니다.
4. 외이도 입구(귓구멍) 상단 부분과 수평이 되는 지점을 측정합니다.



▲ 왼쪽 귀자

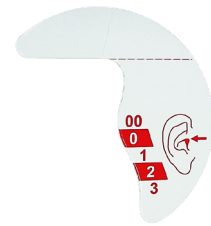

▲ 오른쪽 귀자

3. 리시버 길이에 따른 보청기 착용 예시

1) 정확하게 측정된 리시버 길이

: 리시버가 피부에 밀착되어 안정적인 상태

2) 잘못 측정된 리시버 길이

: 리시버가 뜨고 헐거워 불안정한 상태

