

# Roger

## 멀티토크 네트워크

멀티토크 네트워크(MultiTalker Network, MTN)는 여러 개의 로저 송신기\*(최대 10개)를 연결하여 청각보조기기(보청기 및 인공와우) 사용자가 여러 화자의 음성을 청취할 수 있는 시스템입니다.

\* 호환 가능한 로저 송신기



로저 온 iN



로저 셀렉트 iN & 로저 셀렉트



로저 펜 iN & 로저 펜



### 1. 연결 방법

먼저 청각보조기기와 메인 로저 송신기를 연결한 후, 메인 로저 송신기에 다른 로저 송신기를 추가로 연결합니다.


#### ① 청각보조기기 연결

- 메인 로저 송신기와 청각보조기기(보청기 혹은 인공와우)를 10cm 이내로 가까이 둔 상태에서 페어링 버튼을 누릅니다.

#### ② 로저 송신기 추가 연결

- 메인 로저 송신기와 추가하려는 로저 송신기의 거리를 10cm 이내로 가까이 둔 상태에서 메인 로저 송신기에 있는 페어링 버튼 누릅니다.

### 로저 멀티토크 네트워크 연결 방법

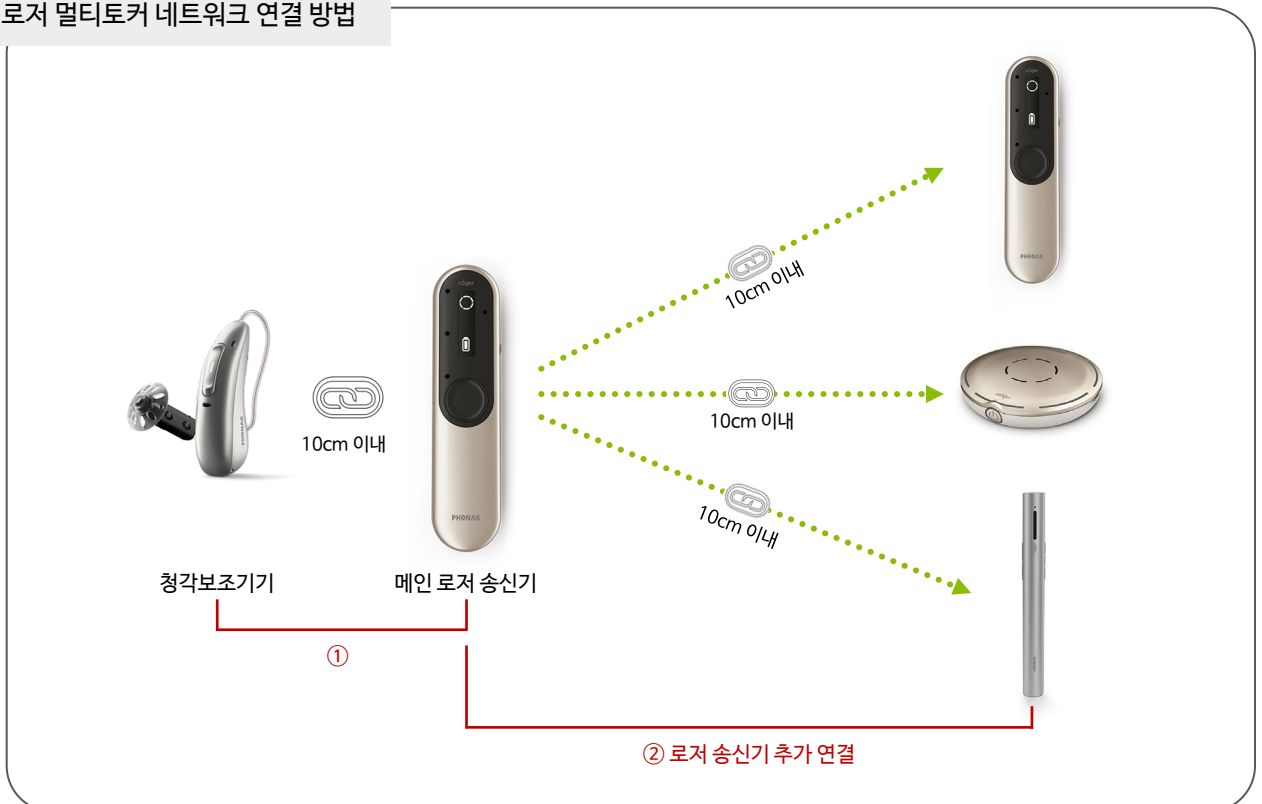

## 2. 특징

1) 한 번에 한 개의 로저 송신기만 사용이 가능합니다.

즉, 한 명의 목소리가 유입되는 동안 다른 로저 송신기는 음소거 상태로 전환되어 2명 이상의 목소리가 중첩되는 것과 주변 소음이 유입되는 것을 방지합니다.

2) 모든 로저 송신기는 목에 걸어 **목걸이 모드로 사용**해야 합니다.

로저 멀티토커 네트워크 사용시, 로저 송신기를 테이블 위에 놓거나(테이블 모드) 손에 들고 있을 때(포인팅 모드)는 자동으로 해당 로저 송신기가 음소거 됩니다.

3) 보청기와 연결한 메인 로저 송신기의 전원이 꺼져도 멀티토커 네트워크는 사용 가능합니다.

## 3. 활용 방법

1) 모든 화자가 목걸이 모드로 사용

: 한 번에 한 명의 목소리만 청취 가능하며, 동시에 말하는 경우 먼저 말을 시작한 화자의 목소리만 청취 가능합니다.




▲ 로저 멀티토커 네트워크 사용 중, 목걸이 모드 예시

2) 테이블 모드로만 사용

: 멀티토커 네트워크 사용시, 로저 송신기(로저 온 iN 및 로저 셀렉트 iN만 해당)를 테이블 위에 놓으면 자동으로 로저 송신기가 음소거 됩니다.

이때, 1개의 송신기만 음소거 버튼을 눌러 수동으로 음소거를 해제하면 테이블 모드로 단독 사용이 가능합니다.

\* 음소거 버튼을 누르면 다른 로저 송신기의 사용이 일시정지되며, 다시 사용하려면 로저 송신기의 음소거 버튼을 누릅니다.

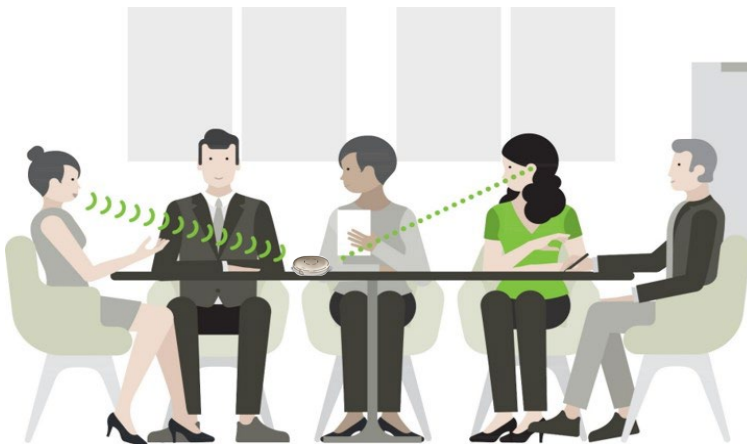

▲ 로저 멀티토커 네트워크 사용 중, 테이블 모드 예시