

로저 인스톨러 & 로저 X

로저 다이렉트 - 로저 인스톨러 & 로저X 설치 가이드

로저 수신기를 마블 보청기에 설치하는 방법은 2가지 입니다.


- 1) 로저 인스톨러와 로저X를 이용하는 방법(교육용 송신기를 사용할 경우 반드시 진행)
- 2) 로저 iN 송신기를 이용하는 방법

로저 iN 송신기를 이용한 로저 설치 과정은 '로저 iN 송신기 설치 가이드'를 참고하십시오.

마블 보청기에 로저 수신기 설치하는 방법

1. 로저 인스톨러에 로저X를 꽂습니다 (C).
(로저X의 핀 3개의 두께가 다르므로, 확인 후 올바르게 꽂아야 합니다)
2. 로저 인스톨러의 전원을 켭니다 (A).
이 때, 아래쪽 상태표시등(B)은 초록색으로 고정됩니다.
3. 위쪽 상태표시등(D)도 초록색으로 고정됩니다(로저X 설치 준비 완료).
4. 보청기의 전원을 켜고, 보청기를 보청기 로고 위에 올려 놓습니다.
5. 가운데 상태표시등(E)이 초록색으로 깜빡거리다가(설치 중) 고정이 되면 설치가 완료됩니다. 동시에 위쪽 상태표시등(D)은 비활성화 됩니다.
6. 로저 인스톨러의 전원을 끄고(A), 로저X를 뽑은 후 보관*합니다.
7. 이제 보청기로 로저 다이렉트 기능을 사용할 수 있습니다.

* 사용한 로저X는 해당 보청기의 시리얼넘버를 메모하여 함께 보관해야 합니다.
보청기 초기화 및 수리 발송 시, 반드시 보청기에 설치된 수신기를 해당 로저X를 이용하여 제거해야 합니다.

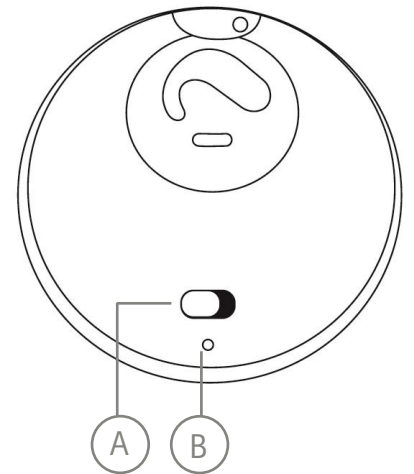

마블 보청기에 설치된 로저 수신기 제거하는 방법

1. 로저 인스톨러에 로저X를 꽂습니다 (C).
2. 로저 인스톨러의 전원을 켭니다 (A).
이 때, 아래쪽 상태표시등(B)은 초록색으로 고정됩니다.
3. 위쪽 상태표시등(D)은 몇 초간 비활성화 상태로 유지됩니다(로저X 제거 준비 완료).
4. 보청기의 전원을 켜고, 보청기를 보청기 로고 위에 올려 놓습니다.
5. 가운데 상태표시등(E)이 초록색으로 나타날 때까지 기다립니다
(보청기에 로저 수신기가 설치되어 있는지 확인).
6. 가운데 상태표시등(E)이 초록색으로 깜빡이면서 제거가 시작됩니다.
7. 제거가 완료되면, 위쪽 상태표시등(D)이 초록색으로 고정됩니다.
8. 로저 인스톨러의 전원을 끄고(A), 로저 X를 뽑습니다.
9. 이제 보청기는 로저 다이렉트 기능을 사용할 수 없습니다.

