


블루투스 & 마이포낙 앱 연결 방법_안드로이드

보청기를 휴대전화에 연결 할 때 아래의 순서에 따라 진행합니다.

* 블루투스 사용이 가능한 보청기: 루미티(오데오, 나이다, 스카이), 파라다이스(오데오, 나이다, 비르토 P-312), 마블(오데오, 나이다, 스카이, 비르토 P-312), 빌롱(오데오 B-D)


1. 휴대전화 블루투스 페어링하기: 핸드프리 전화통화 및 스트리밍

[설정] - [연결] - [블루투스] - '보청기 전원 켜기' - [블루투스 활성화 및 '찾기'] - [R-Phonak 보청기 혹은 L-Phonak 보청기] 클릭

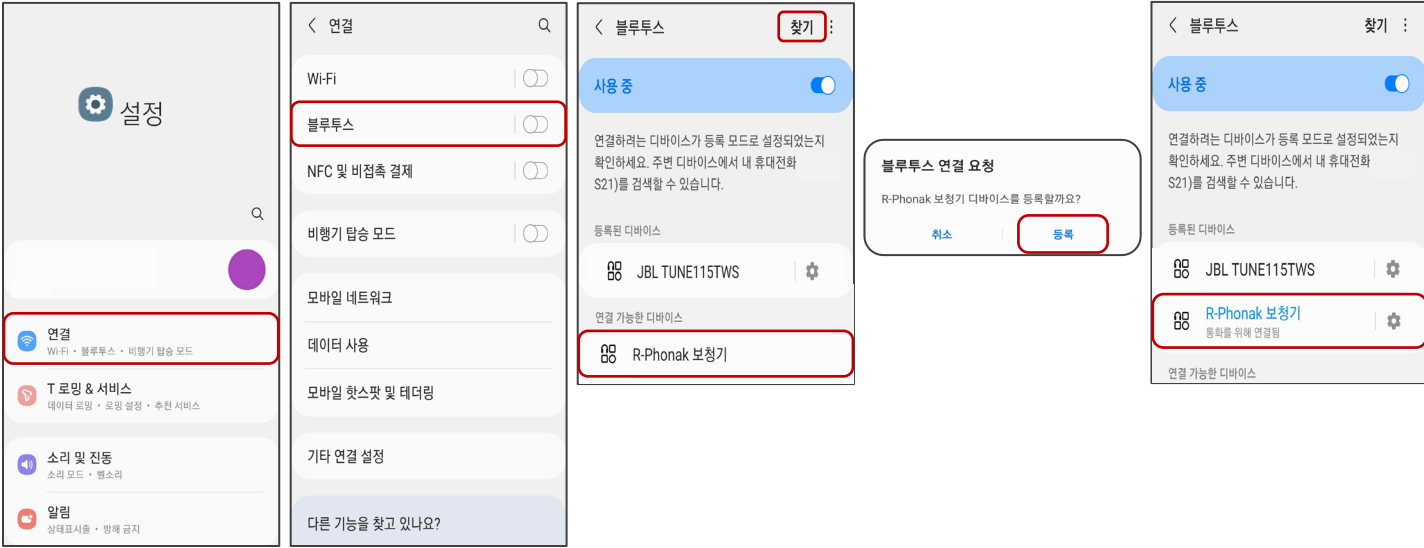


2. 마이포낙 앱 장치 페어링하기

[Play 스토어] - '마이포낙' 혹은 'myphonak' 검색 - [설치] - [마이포낙 앱] 실행 - [홈] 혹은 [장치]에서 '장치 페어링' 선택 - [계속] - '보청기 전원 켜기' - [보청기 선택] - [페어링] - [계속]

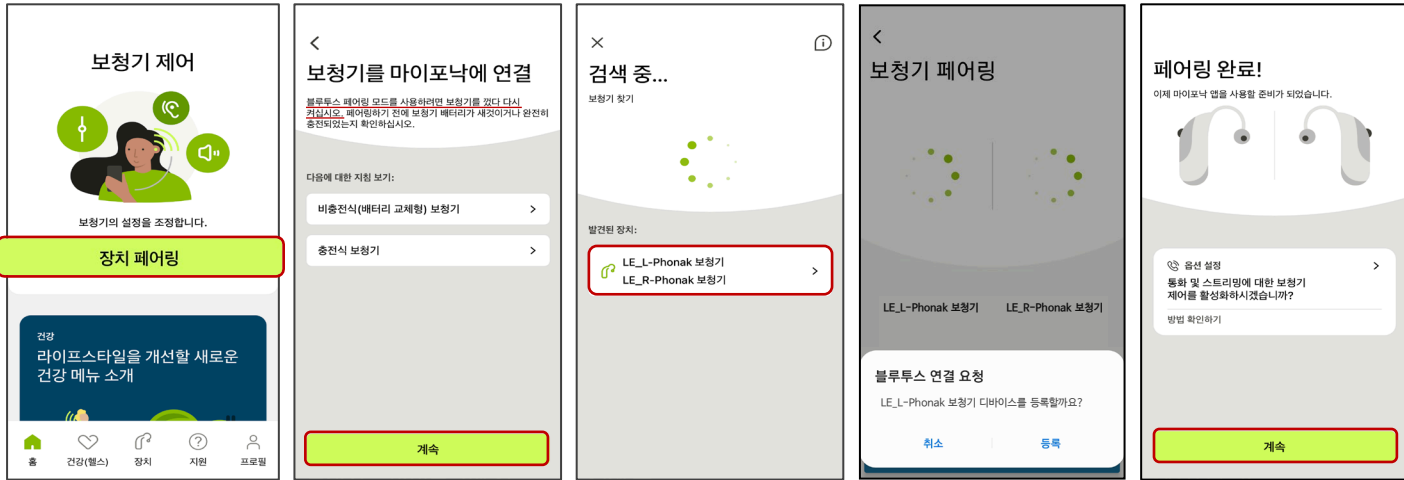

3. 휴대전화 블루투스

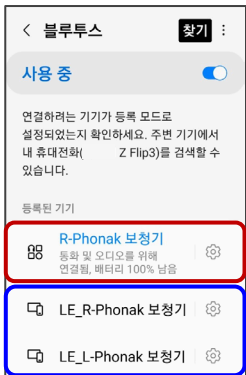

→ R-Phonak 보청기 혹은 L-Phonak 보청기: 핸드프리 전화통화, 스트리밍(블루투스 클래식)


→ LE_L-Phonak 보청기 혹은 LE_R-Phonak 보청기: 마이포낙 앱(저전력 블루투스)

블루투스 & 마이포낙 앱 연결 해제 방법_안드로이드

마이포낙 앱이 정상적으로 작동하지 않을 때 아래의 순서에 따라 진행합니다.

1. 마이포낙 앱에서 보청기 삭제하기

[마이포낙 앱] - [장치] - [제품 정보] - [장치 삭제하기] - [확인]

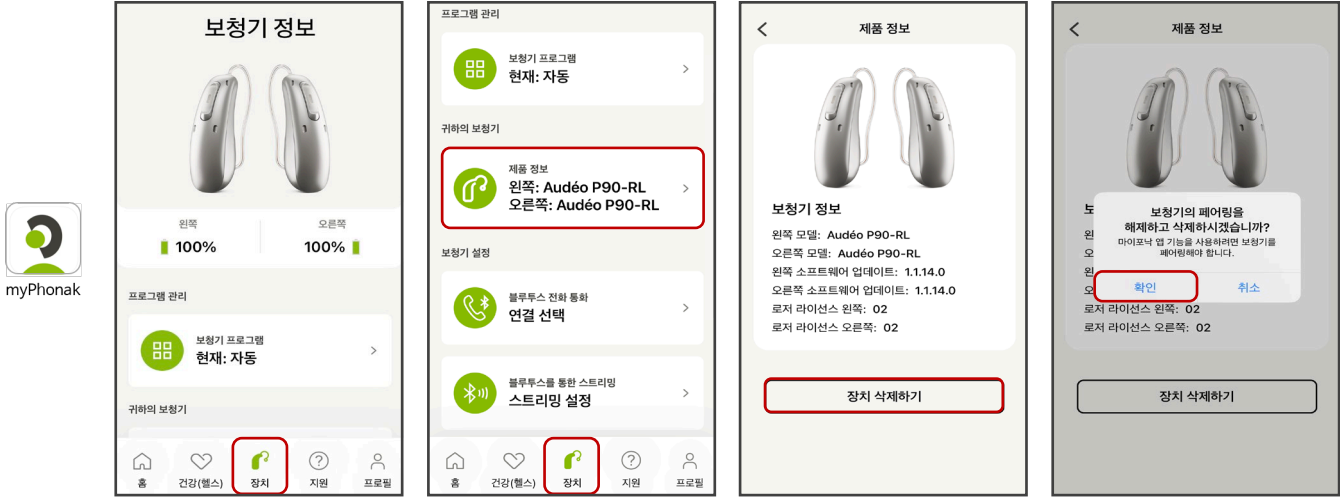


2. 휴대전화 블루투스에서 보청기 삭제하기

[설정] - [연결] - [블루투스] - [⚙️] 클릭 - [등록 해제] - [등록 해제]

* 삭제해야 하는 기기 목록

- 양이 보청기 사용자: R-Phonak 보청기 혹은 L-Phonak 보청기, LE-R Phonak 보청기, LE-L Phonak 보청기(3개)
- 편측 보청기 사용자: R-Phonak 보청기 혹은 L-Phonak 보청기, LE-R Phonak 보청기 혹은 LE-L Phonak 보청기(2개)

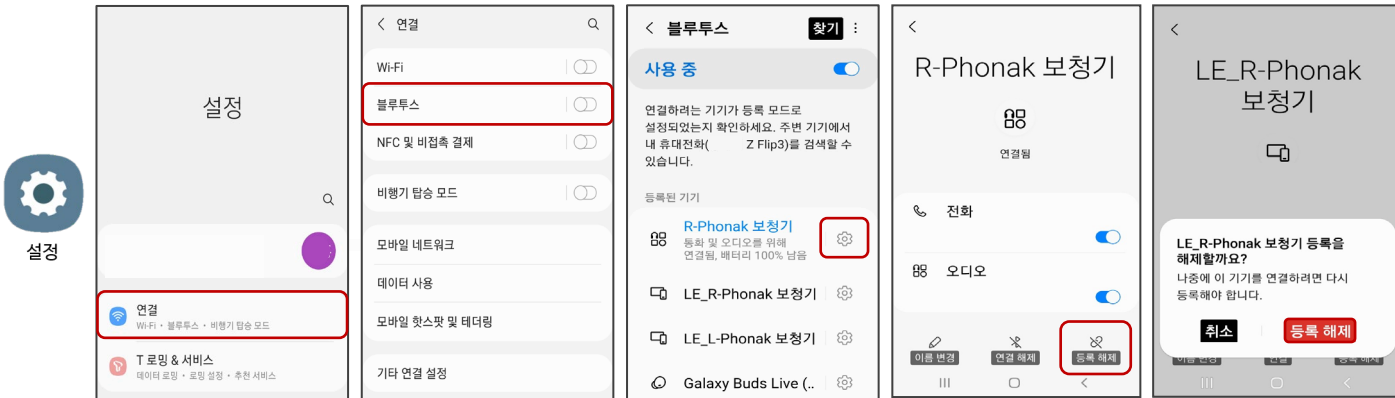

3. Target에서 블루투스 데이터 삭제하기

[피팅] - [장치 옵션] - [블루투스&스트리밍] - [블루투스 데이터 삭제하기] 클릭 - [저장 및 닫기]



4. '마이포낙 앱 & 블루투스 연결 방법'을 참고하여 보청기를 재연결합니다.


블루투스 & 마이포낙 앱 연결 방법_iOS

보청기를 휴대전화에 연결 할 때 아래의 순서에 따라 진행합니다.

* 블루투스 사용이 가능한 보청기: 루미티(오데오, 나이다, 스카이), 파라다이스(오데오, 나이다, 비르토 P-312), 마블(오데오, 나이다, 스카이, 비르토 P-312), 빌롱(오데오 B-D)


1. 휴대전화 블루투스 페어링하기: 핸드프리 전화통화 및 스트리밍

[설정] - [Bluetooth] - [블루투스 활성화] - '보청기 전원 켜기' - [R-Phonak 보청기 혹은 L-Phonak 보청기] 클릭

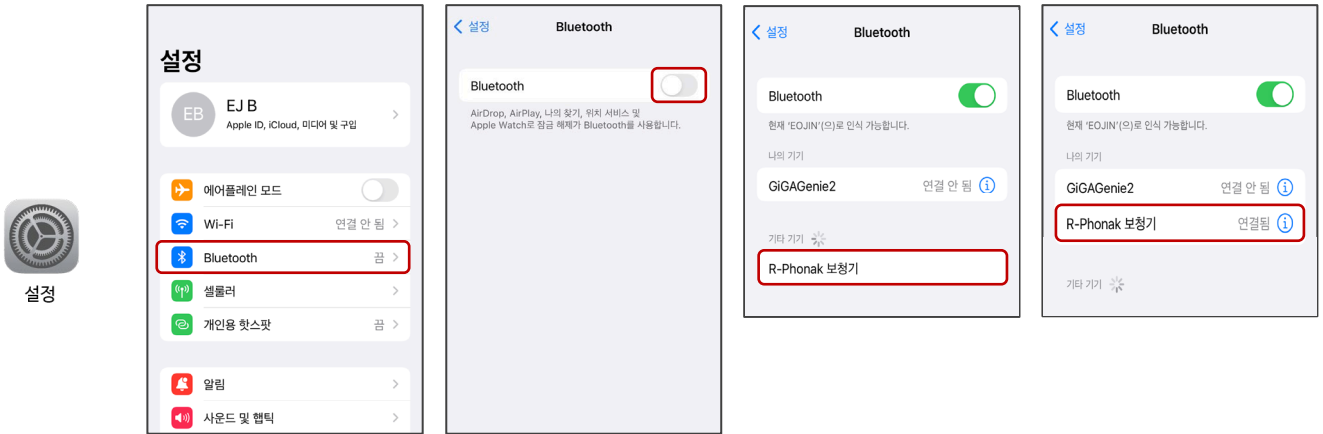


2. 마이포낙 앱 장치 페어링하기

[App Store] - '마이포낙' 혹은 'myphonak' 검색 - [설치] - [마이포낙 앱] 실행 - [홈 혹은 [장치]에서 '장치 페어링' 선택 - [계속] - '보청기 전원 켜기' - [보청기 선택] - [페어링] - [계속]

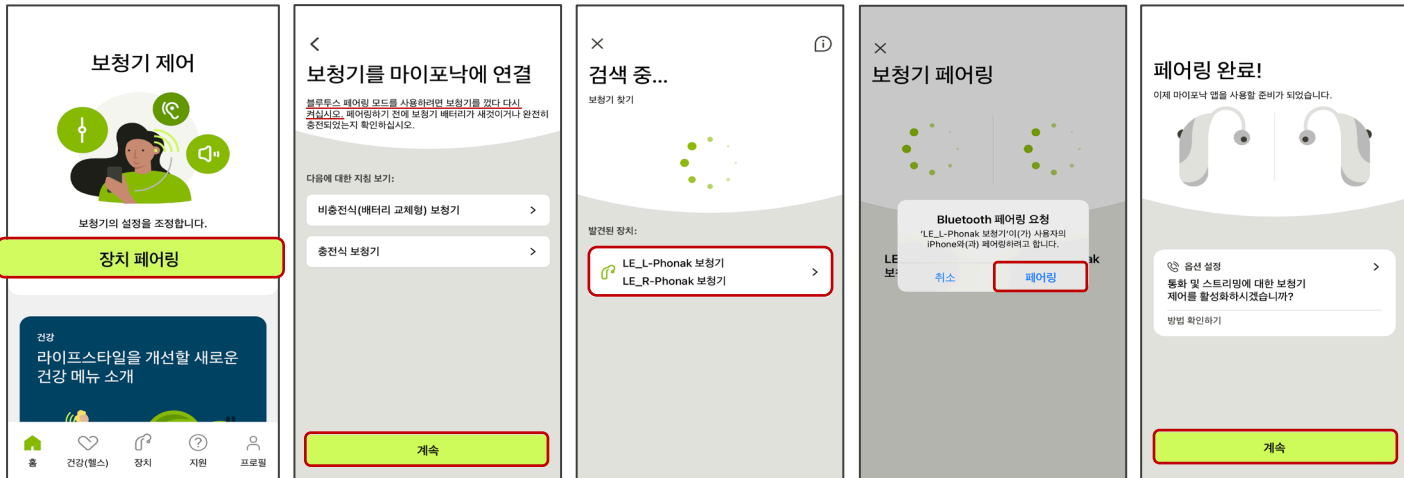

3. 휴대전화 블루투스 목록

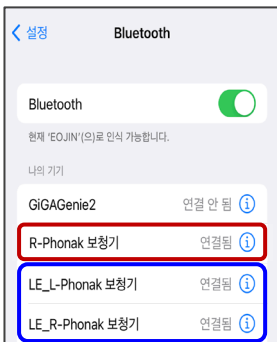

→ R-Phonak 보청기 혹은 L-Phonak 보청기: 핸드프리 전화통화, 스트리밍(블루투스 클래식)




→ LE_L-Phonak 보청기 혹은 LE_R-Phonak 보청기: 마이포낙 앱(저전력 블루투스)

블루투스 & 마이포낙 앱 연결 해제 방법_iOS

마이포낙 앱이 정상적으로 작동하지 않을 때 아래의 순서에 따라 진행합니다.

1. 마이포낙 앱에서 보청기 삭제하기

[마이포낙 앱] - [장치] - [제품 정보] - [장치 삭제하기] - [확인]


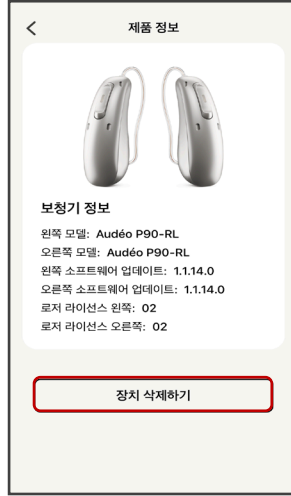
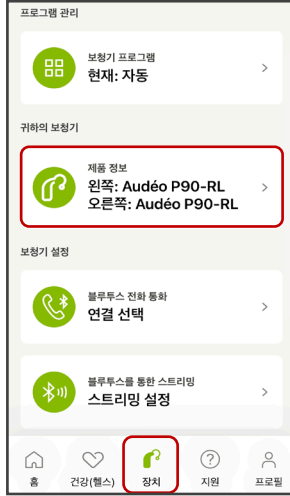
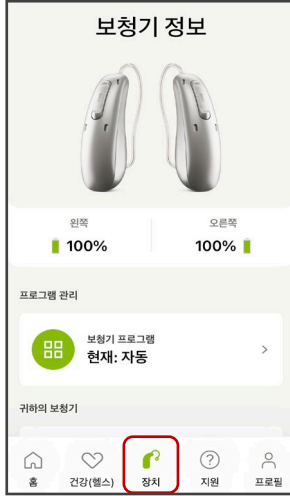


2. 휴대전화 블루투스에서 보청기 삭제하기

[설정] - [Bluetooth] - [ⓘ]클릭 - [이 기기 지우기] - [기기 지우기]

* 삭제해야 하는 기기 목록

- 양이 보청기 사용자: R-Phonak 보청기 혹은 L-Phonak 보청기, LE-R Phonak 보청기, LE-L Phonak 보청기 (3개)
- 편측 보청기 사용자: R-Phonak 보청기 혹은 L-Phonak 보청기, LE-R Phonak 보청기 혹은 LE-L Phonak 보청기 (2개)

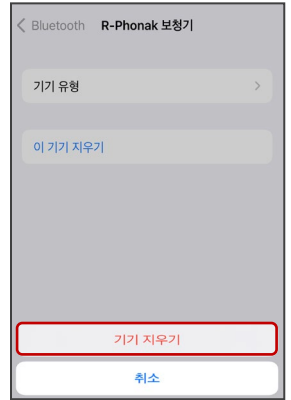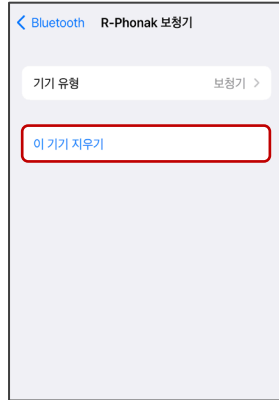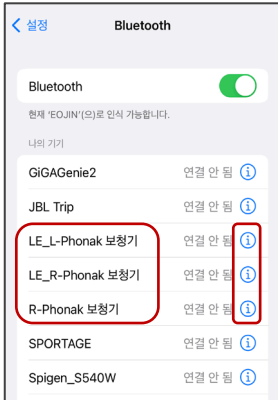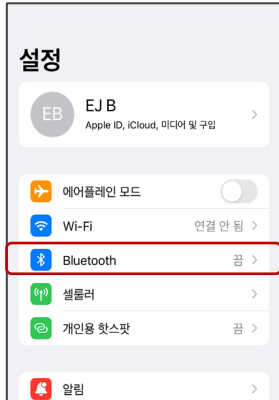

3. Target에서 블루투스 데이터 삭제하기

[피팅] - [장치 옵션] - [블루투스 & 스트리밍] - [블루투스 데이터 삭제하기] 클릭 - [저장 및 닫기]



4. '마이포낙 앱 & 블루투스 연결 방법'을 참고하여 보청기를 재연결합니다.