

블루투스 비교


포낙은 블루투스 연결을 위해 2개의 프로토콜을 지원합니다.

1. 블루투스 클래식: 핸드프리 전화통화와 스트리밍(음악 및 영상 청취)을 위한 블루투스
 - 휴대전화 [설정]에서 연결
2. 저전력 블루투스: 앱(APP) 사용을 위한 블루투스
 - 마이포낙 앱에서 연결

1. 블루투스 클래식

핸드프리 전화통화와 스트리밍을 위한 블루투스 연결방법

- ① 휴대전화의 [설정] - [블루투스] 에서 블루투스를 활성화합니다.
- ② 보청기의 전원을 켭니다.
 - * 보청기의 전원이 이미 켜져 있더라도 다시 한번 전원을 껐다 켭니다.
- ③ 블루투스 목록에서 보청기 이름(기본값: R-Phonak 보청기)을 눌러 장치로 등록합니다.
- ④ 지금부터 핸드프리 전화통화와 미디어 스트리밍이 가능합니다.

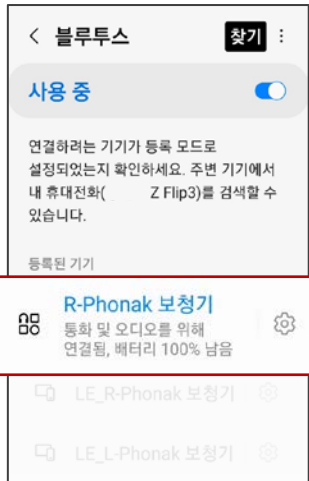


참고) 기준이 되는 한 쪽 보청기만 연결

- 양쪽 혹은 오른쪽 보청기 연결 시 → R-Phonak 보청기
- 왼쪽 보청기 연결 시 → L-Phonak 보청기

2. 저전력 블루투스

마이포낙 앱 사용을 위한 블루투스 연결방법

- ① Play 스토어(안드로이드) 혹은 APP Store(아이폰)에서 “마이포낙” 을 설치합니다.
- ② 마이포낙 앱에서 ‘장치 페어링’을 누른 후, 보청기의 전원을 켭니다.
 - * 보청기의 전원이 이미 켜져 있더라도 다시 한번 전원을 껐다 켭니다.
- ③ ‘계속’을 누르고 페어링이 완료되면, 보청기 볼륨 및 프로그램 조절 등이 가능합니다.

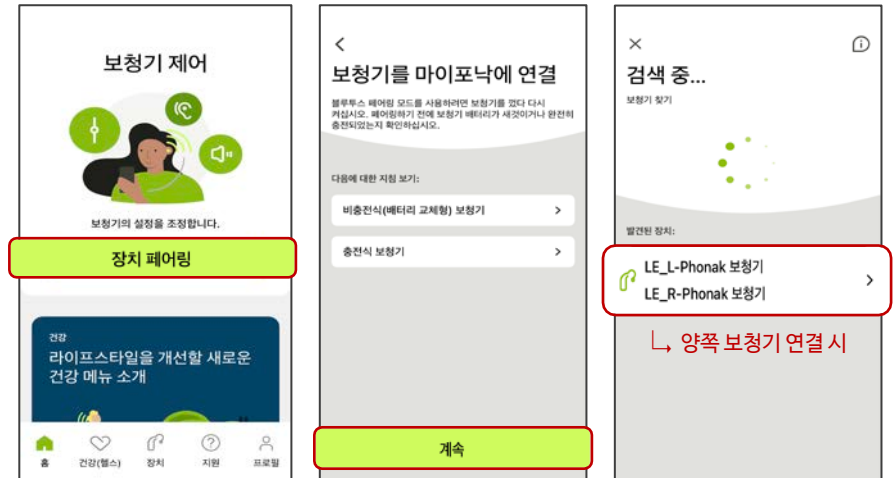

참고) 페어링하려는 모든 보청기 연결

- 양쪽 보청기 연결 시 → 양쪽 연결
- 오른쪽 혹은 왼쪽 보청기 연결 시 → 한 쪽 연결