

음향 전화: 이지폰, 듀오폰

전화통화 시 사용되는 프로그램에는 **음향 전화**와 **블루투스 전화통화**가 있습니다.

➤ **음향 전화:** 블루투스가 탑재되지 않은 유선 전화기 혹은 휴대전화로 통화할 때 사용합니다.

음향 전화 프로그램을 기반으로 하는 기능에는 ①이지폰과 ②듀오폰이 있습니다.

➤ **블루투스 전화통화:** 블루투스가 탑재된 휴대전화와 페어링하여 핸드-프리 전화 통화할 때 사용합니다.

보청기 호환성		음향 전화		블루투스 전화통화
		① 이지폰	② 듀오폰	
사용 가능한 제품	귓속형	모든 귓속형 보청기 (단, 비르토 312는 제외) * 주문 시, 특이사항에 이지폰 추가 요청 기재	방향성 마이크로폰이 탑재된 50등급 이상의 모든 보청기 예) 비르토 P90 -10 NW O 혹은 오데오 L30-312는 사용 불가	비르토 P-312 비르토 M-312
	오픈형	빌롱 플랫폼까지의 제품은 기본 탑재		모든 루미티, 파라다이스, 마블 보청기
	귀걸이형	* 루미티, 파라다이스, 마블 보청기는 사용 불가		


1. 이지폰(Easyphone)

▪ 기능 설명

: 이지폰은 수화기를 보청기를 착용한 귀에 가까이 댔을 때 **‘음향 전화’ 프로그램으로 자동 전환해주는 기능**입니다.

전화통화가 끝나고 수화기를 귀에서 떼면 이전 프로그램(예. 오토센스 OS)으로 되돌아갑니다.

이지폰이 탑재되어 있으면 **‘음향 전화’ 프로그램이 추가 프로그램에 기본으로 설정되어 있어 별도로 추가하지 않아도 됩니다.**

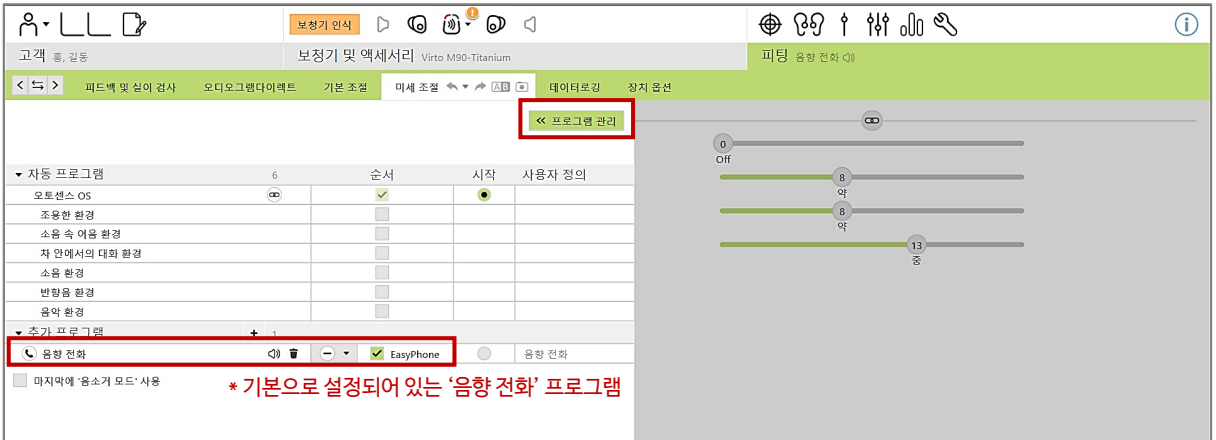

▪ 이지폰을 사용하기 위한 필수 조건

① 이지폰 기능 탑재

- 귓속형 보청기: 주문 시 **오더폼 특이사항에 이지폰 추가 요청 기재(셸 사이즈에 큰 영향 없음)**

비르토P-312, M-312는 이지폰 사용 불가

- 오픈형, 귀걸이형 보청기: 빌롱 플랫폼까지만 내장(루미티, 파라다이스, 마블 보청기는 사용 불가)

⇒ 즉, **블루투스 전화통화가 가능한 보청기(예. 오데오L-R, 나이다P-UP, 비르토 M-312 등)는 이지폰 사용 불가**

② 모든 등급의 제품(비투스 포함)

▪ 자석 부착 방법

: 대부분의 유선 전화기는 이지폰을 활성화하기에 충분한 자기장을 생성합니다. 충분한 자기장이 생성되지 않는 경우에는 수화기에 자석을 부착해야 합니다.

① 수화기를 깨끗이 닦습니다.

② 동봉된 양면테이프를 사용하여 자석을 부착합니다. 이때 수화기 구멍을 막지 마십시오.

- 수화기를 오른손으로 들고 통화하는 경우, 수화기 오른쪽 상단에 자석을 부착

- 수화기를 왼손으로 들고 통화하는 경우, 수화기 왼쪽 상단에 자석을 부착

③ 처음에는 최적의 위치를 찾기 위해 수화기를 약간 움직여야 할 수도 있습니다. 필요한 경우 자석의 위치를 옮기십시오.



2. 듀오폰(Duophone)

▪ 기능 설명

: 전화통화 시 한 쪽 보청기로 유입된 음원이 실시간으로 반대쪽 보청기로 스트리밍되어 양쪽으로 청취가 가능하므로 전화통화가 개선됩니다.

▪ 듀오폰을 사용하기 위한 필수 조건

① 양이 착용

② 방향성 마이크로폰 탑재(듀오폰은 '양이음성스트리밍' 기술 사용)

③ 50(스탠다드)등급 이상의 제품



▪ 사용 방법

- 이지폰이 탑재되어 있는 보청기: 수화기를 보청기를 착용한 귀에 가까이 댔을 때

음향 전화 프로그램으로 자동 전환되어 전화통화 시 듀오폰 활성화

- 이지폰이 탑재되어 있지 않은 보청기

: Phonak Target - [피팅] - [미세조정]에서 추가 프로그램에 '음향 전화' 추가

: 사용자가 프로그램 변경 버튼을 눌러야 '음향 전화' 프로그램으로 전환되어 전화통화 시 듀오폰 활성화

