

피팅 장비 및 피팅 케이블 호환성 가이드

보청기 플랫폼 및 형태에 따라 호환되는 피팅 장비가 다르므로, 아래 표를 참고하여 보청기를 연결하시기 바랍니다.

1. 피팅 장비 호환성




제품명		Noahlink Wireless (노아링크 와이어리스)	HI-PRO(하이프로) Noahlink(노아링크)	iCube II (아이큐브2)
루미티	슬림	슬림 L-R	-	
	오데오	오데오 L-R 오데오 L-RL	-	
	나이다	나이다 L-PR 나이다 L-UP	나이다 L-UP	
	스카이	스카이 L-PR 스카이 L-UP	스카이 L-UP	
	크로스	크로스 L-R	-	
파라다이스	비르토	비르토 P-312	비르토 P-T 비르토 P-10 NW O 비르토 P-312 NW O 비르토 P-312	
	오데오	오데오 P-R, 오데오 P-RL 오데오 P-312 오데오 P-13T 오데오 P-R Fit	오데오 P-13T	-
	나이다	나이다 P-PR, 나이다 P-UP	나이다 P-UP	
	크로스	크로스 P-R, 크로스 P-13	크로스 P-13	
마블	비르토	비르토 M-312	비르토 M-T 비르토 M-10 NW O 비르토 M-312 NW O 비르토 M-312	
	오데오	오데오 M-R, 오데오 M-312 오데오 M-13T	오데오 M-13T	
	나이다	나이다 M-SP	나이다 M-SP	
	스카이	스카이 M-M, 스카이 M-PR 스카이 M-SP	스카이 M-SP	
빌롱	비르토	-	비르토 B-T 비르토 B-10 NW O 비르토 B-10 O, 비르토 B-10 비르토 B-312 NW O 비르토 B-312	비르토 B-10 O, 비르토 B-10 비르토 B-312
	오데오	오데오 B-D	오데오 B-312	오데오 B-R, 오데오 B-10 오데오 B-312
	나이다	-	나이다 B-SP, 나이다 B-UP	나이다 B-SP, 나이다 B-UP
	스카이	-	스카이 B-M 스카이 B-SP, 스카이 B-UP	스카이 B-M, 스카이 B-PR 스카이 B-SP, 스카이 B-UP
	크로스	-	크로스 B-312	크로스 B-R, 크로스 B-312

*참고: 슬림/오데오(오픈형), 비르토(귓속형), 나이다(귀걸이형), 스카이(유소아 귀걸이형)


* 참고: Target 피팅 소프트웨어에서 보청기를 선택하면, 호환 가능한 피팅 장비를 확인할 수 있습니다.

(선택한 보청기와 호환되지 않는 피팅 장비에는 [!]가 나타남)

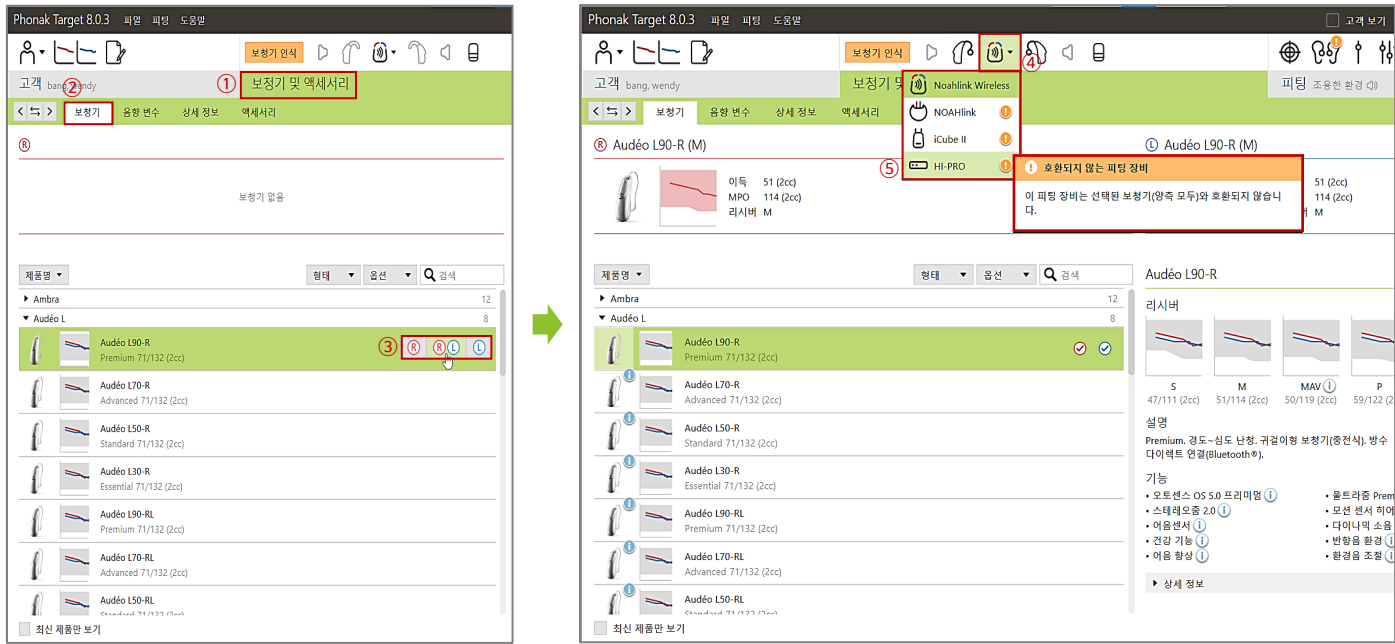

2. 피팅 장비 연결 상태 확인

Target 피팅 소프트웨어에서 올바른 피팅 장비를 선택하였지만 보청기가 인식되지 않는 경우, 피팅 장비의 연결 상태를 확인합니다.

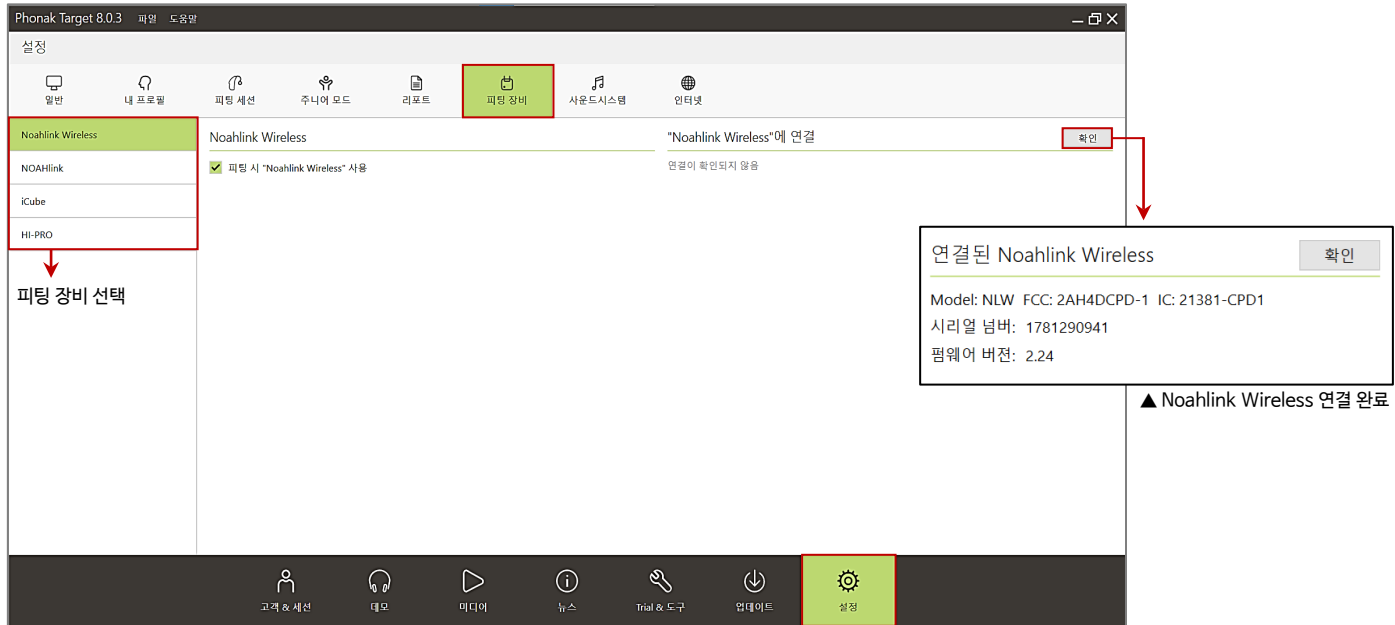


▲ Target - [설정] - [피팅 장비] - [피팅 장비 선택] - [확인]

* 호환되는 피팅 장비 및 케이블을 사용하여 올바르게 연결했음에도 보청기가 인식되지 않는 경우, Target이 최신 버전인지 확인해야 합니다. 최신 버전이 아니면 반드시 '웹하드'에서 최신 Target 파일을 다운로드 받아 업데이트하시기 바랍니다.

3. 피팅 케이블 연결 방법

피팅 (프로그래밍) 케이블은 하이프로(HI-PRO)와 호환 가능한 보청기를 연결할 때 사용합니다.


꺾속형 보청기 케이블 (10A / 312A)

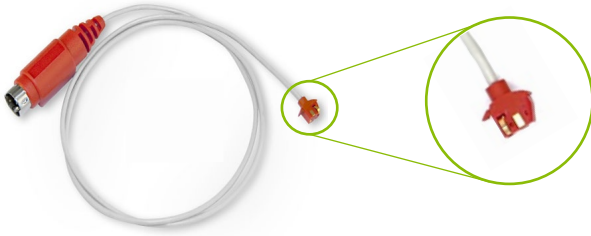


* 꺾속형 보청기에 삽입하는 필 (pill)의 크기에 따라 10A와 312A로 구분합니다.

꺾속형 보청기와 하이프로 연결하기

1. 꺾속형 보청기의 배터리 도어를 열고, 도어틀의 홈이 있는 부분을 배터리 도어에 끼운 후, 화살표 방향으로 기울여서 분리합니다. 도어틀이 없는 경우에는 손으로 배터리 도어를 잡고 같은 방식으로 분리합니다.
2. 10A 혹은 312A 필을 보청기에 삽입합니다.
3. 반대쪽 케이블은 하이프로에 연결합니다.

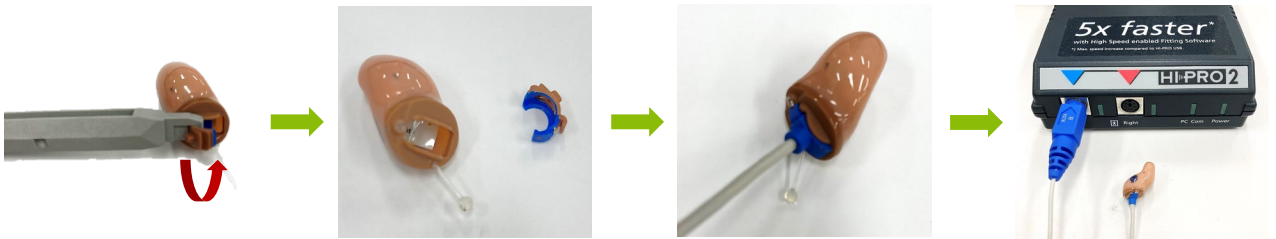

오픈형/귀걸이형 보청기 케이블

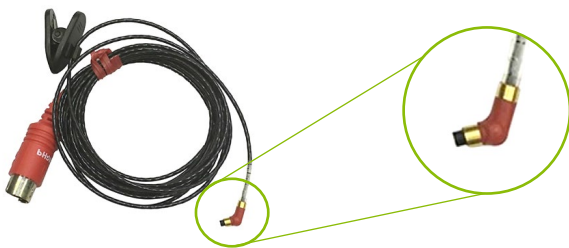

오픈형/귀걸이형 보청기와 하이프로 연결하기

1. 보청기의 배터리 도어를 열고, 내부에 보이는 동그란 홈에 케이블을 삽입합니다.
2. 반대쪽 케이블은 하이프로에 연결합니다.

