

Phonak Virto B



Варианты исполнения, уровни производительности и мощности:

Доступные уровни мощности в различных вариантах исполнения					
M	•	•	•	•	•
P	•	•	•	•	•
SP	•	•	•	•	•
UP					•
Вариант корпуса					
IIC-nano	•				
CIC	•	•	•		
MC	•	•	•	•	
ITC	•	•	•	•	•
HC	•	•	•	•	•
FC	•	•	•	•	•
Аппаратная конфигурация					
Батарейка	10	312	10	10	312
Переключатель (программы/громкость)	•	•	•	•	•
Регулятор громкости (колесо)		опция	опция	опция	опция
T-катушка					
EasyPhone	•	•	•	•	•
Микрофон	Omni	Omni	Omni	направленный	направленный
QuickSynk			•	•	•
BVST				•	•
IP68 (без регулятора громк.)	•		•		

Основные технические характеристики (для куплера объемом 2 см³)

Параметр	Ресивер			
	M	P	SP	UP
ВУЗД90 (дБ УЗД)	109	115	119	127
Макс. усиление (дБ)	40	50	60	70
Диапазон частот (Гц)	<100-7000	<100-6700	<100-7000	<100-5200
Рабочий ток (мА)	1,2	1,2	1,2	1,2


Диапазоны подбора

M

P

SP

UP

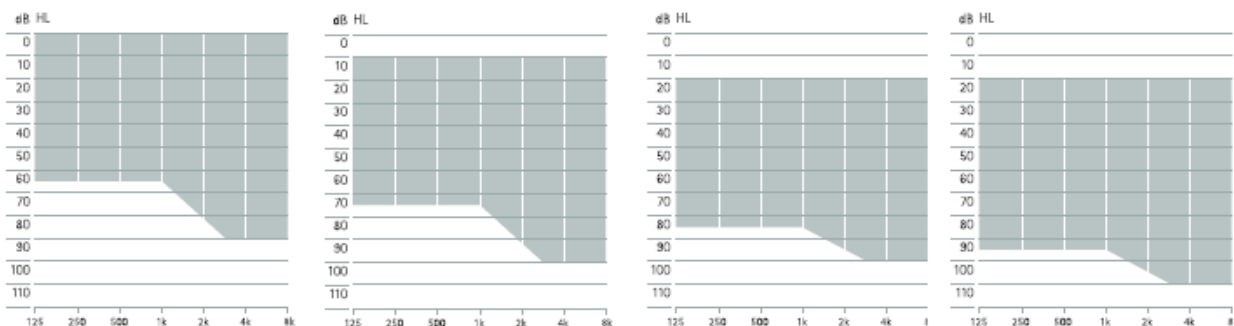

Программа настройки: Phonak Target 5.2 и выше

Программаторы: iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Беспроводные аксессуары: , Phonak ComPilot Air II, Phonak ComPilot II, Phonak TVLink II, Phonak RemoteMic (только вместе с ComPilot II или ComPilot Air II), EasyCall II. *Пульты ДУ:* Phonak PilotOne II, Phonak MiniControl (nano)

Приемники Roger: Roger X / ComPilot II, Roger MyLink.

Программы и функции:

AutoSense OS - алгоритм распознавания акустической обстановки

Речь в машине - Уменьшает характерный для автомобиля широкополосный шум, облегчая общение и снижая слуховое напряжение.

Комфорт в эхо - Распознает частоту реверберации и уменьшает усиление, устраняя искажения и повышая комфортность.

Речь в громком шуме - Фокусируется на единственном собеседнике в условиях диффузного шума, повышая разборчивость речи (см. также auto StereoZoom).

Речь на ветру - Передача низкочастотной части сигнала микрофонов из аппарата, менее подверженного воздействию ветра, в аппарат, более подверженный воздействию ветра.

(auto) StereoZoom - (автоматическая) активация узколучевой бинауральной направленности в соответствии со специальным алгоритмом оценки окружающей акустической обстановки.

(auto) ZoomControl (Речь на 360°) - (автоматический) выбор направления прослушивания, в зависимости от пространственного расположения источника речевого сигнала.

FlexVolume – нелинейная регулировка громкости в соответствии с профилем аудиграммы.

FlexControl - интегрированная в автоматическую программу функция внесения пользовательских поправок, объединяющая одновременную настройку шести параметров

(направленность, шумоподавление, подавление шума ветра, подавление реверберации, компрессия, FlexVolume).

Баланс тиннитуса - встроенный генератор шумов способствует обогащению звуковой среды и может использоваться в качестве составной части индивидуальной программы борьбы с шумом в ушах.

auto Acclimatization - автоматическое постепенное повышение уровня усиления в процессе использования в соответствии с временными и числовыми параметрами, заданными аудиологом.

SoundRecover/ SoundRecover II - нелинейная частотная компрессия.

WhistleBlock - адаптивное подавление обратной связи.

NoiseBlock - высокоразрешающее шумоподавление.

WindBlock - подавление шума ветра.

EchoBlock - подавление эха и реверберации.

SoundRelax - подавление импульсных звуков.

DuoPhone - бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху.

UltraZoom - адаптивная направленность, учитывающая взаимное расположение источников полезного сигнала и шума.

SNR-Boost - адаптивное повышение отношения сигнал-шум, основанное на сочетании направленности и шумоподавления.

QuickSync - синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости.

Реализация функций в зависимости от уровня производительности

Программа / Функция	Уровень производительности			
	90	70	50	30
AutoSense OS	Premium	Advanced	Standard	Essential
Тихая ситуация	•	•	•	•
Речь в шуме	•	•	•	•
Комфорт в шуме	•	•	•	
Музыка	•	•		
Речь в громком шуме	•			
Речь в машине	•			
Комфорт в эхо	•			
Дополнительные программы	5	5	5	5
Речь на ветру	•			
Комфорт в эхе	•			

Программа / Функция	Уровень производительности			
	90	70	50	30
Речь в громком шуме	•	•		
Речь на 360°	•	•		
Речь в шуме	•	•	•	•
Тихая ситуация	•	•	•	•
Комфорт в шуме	•	•	•	•
Музыка	•	•	•	•
Акустический телефон	•	•	•	•
Собственная программа				
Программы стриминга	4	4	4	4
Функции				
UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
SNR-Boost	•	•	•	
FlexControl	•	•	•	
FlexVolume	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover 2	•	•	•	•
Настройка по предпочтениям пользователя	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Баланс тиннитуса	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Количество каналов	20	16	12	8