

Ежедневная проверка Roger X

Краткое руководство

roger



Прослушивание

Проводится каждое утро

1. Прослушайте слуховой аппарат. Если он не работает, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
2. Если слуховой аппарат работает, подключите к нему приемник Roger X и включите микрофон педагога.
 - a. Слуховой аппарат должен находиться в соответствующей программе.
 - b. Если программа Roger установлена по умолчанию, достаточно просто включить слуховой аппарат, закрыв дверцу батарейного отсека.
3. Говорите в микрофон педагога. Вы должны четко слышать свой голос в слуховом аппарате.



Поиск и устранение неисправностей

Неисправность

Устранение

Отсутствие звука в слуховом аппарате

- Замените батарейку в слуховом аппарате.
- Повреждена трубочка или во вкладыше скопилась влага/грязь?
 - Отсоедините трубочку с вкладышем от рожка. Слуховой аппарат заработал? Если да, то это свидетельствует о загрязнении вкладыша или повреждении трубочки.

Микрофон Roger не слышен через слуховой аппарат

- Убедитесь, что микрофон включен.
- Отсоедините и вновь присоедините к слуховому аппарату аудиоадаптер.
- Отсоедините и вновь присоедините к аудиоадаптеру приемник Roger X.
- Замените батарейку в слуховом аппарате.
- Убедитесь, что в слуховом аппарате выбрана нужная программа.
- Убедитесь, что звук микрофона не отключен.
- Нажмите клавишу "Связь" на Roger inspiro.

Если вышеперечисленные действия не привели к устранению неисправности, обратитесь к специалисту.