

Ежедневная проверка устройств Roger™

Краткое руководство

roger



Для гарантированного полноценного участия детей в образовательном процессе используемые ими устройства должны надежно работать.

Прослушивание устройств

1. Прослушайте слуховой аппарат. Если он не работает, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
2. Если слуховой аппарат работает, убедитесь, что выбрана соответствующая программа Roger.
3. Включите микрофон Roger. Вы должны четко слышать свой голос в слуховом аппарате.

Рекомендации по поиску и устранению неисправностей

Неисправность

Устранение

Отсутствие звука в слуховом аппарате

- Замените батарейку в слуховом аппарате (перед тем, как вставить батарейку в аппарат, удалите защитную наклейку и подождите 2 минуты).
- Повреждена трубочка или во вкладыше скопилась влага/сера/грязь?
 - Отсоедините трубочку с вкладышем от рожка. Слуховой аппарат заработал? Если да, то это свидетельствует о загрязнении вкладыша или повреждении трубочки.

Микрофон Roger не слышен через слуховой аппарат

- Убедитесь, что микрофон включен и не приглушен.
- Коснитесь значка "Подключить" на экране микрофона Roger.
 - Поднесите микрофон к приемнику на расстояние не более 10 см.
- Коснитесь значка "Проверка", чтобы подтвердить сетевое подключение.
- Для приемника Roger X – отсоедините и вновь присоедините к слуховому аппарату аудиоадаптер с приемником Roger X.
 - Очистите контакты от наклеек и грязи.
- Замените батарейку слухового аппарата.
- Убедитесь, что в слуховом аппарате выбрана нужная программа.

Если вышеперечисленные действия не привели к устранению неисправности, обратитесь к специалисту.