

# Использование Roger™ Pass-around в классе

## Краткое руководство

roger



Roger Pass-around предназначен для того, чтобы не только педагоги, но и дети могли хорошо слышать всех находящихся в помещении. Roger Pass-around можно передавать из рук в руки или же поместить в стойку, расположенную на столе перед двумя учащимися.

## Работа с устройством

### Общие указания

- Чтобы включить Roger Pass-around, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд расположенную сбоку кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Зеленый индикатор мигнет несколько раз.
- Чтобы выключить Roger Pass-around, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд расположенную сбоку кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Зеленый индикатор мигнет несколько раз.
- Во время зарядки с помощью шнура USB или Roger Charging Rack индикатор мигает зеленым светом. По завершении зарядки свечение индикатора становится постоянным.



### Перед первым использованием

- Включите Roger Pass-around.
- Поднесите Roger Touchscreen Mic к Roger Pass-around на расстояние не более 10 см и коснитесь значка "Подключить" на экране Touchscreen Mic.

### Повседневное использование

Roger Pass-around работает автоматически и не требует ежедневного подключения. Чтобы быть услышанным, достаточно просто говорить в микрофон.

- **В руке** – Говорящий должен поднести микрофон ко рту. Если голос улавливается микрофоном, световой индикатор ярко светится зеленым цветом.
- **В стойке** – Roger Pass-around можно поместить в легкую, но прочную стойку. Стойка должна находиться на столе перед говорящими.
- Если положить Roger Pass-around на стол, он автоматически отключится (световой индикатор начнет мигать красным цветом) во избежание передачи случайных звуков.

## Дополнительные функции

### Нажмите-говорите

Можно запрограммировать Roger Pass-around так, чтобы он активировался только при нажатии на кнопку.

- **В руке** – Говорящий должен нажать и удерживать большую кнопку Pass-around. При этом световой индикатор будет ярко светиться зеленым цветом. Световые индикаторы остальных Roger Pass-around будут светиться оранжевым цветом, означая, что они находятся в режиме ожидания.
- **В стойке** – Пользователь должен коротко нажать большую кнопку Roger Pass-around. Световой индикатор загорится зеленым цветом. По завершении разговора необходимо повторно коротко нажать на кнопку, чтобы вернуть микрофон в обычный режим.