

Использование Roger™ Touchscreen Mic и приемников Roger

Краткое руководство

roger



Roger Touchscreen Mic – простое и интуитивное в использовании устройство. Его конструкция позволяет всем присутствующим в классе знать, когда микрофон включен и передает звук.

Микрофон

Roger Touchscreen Mic

Чтобы включить микрофон, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд расположенную сбоку кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Зеленый индикатор мигнет несколько раз.

- Повесьте Roger Touchscreen Mic на шею говорящему и отрегулируйте длину шнура так, чтобы микрофон находился на расстоянии 20 см от рта.
- Чтобы подключить приемник ученика, поднесите Roger Touchscreen Mic к приемнику Roger на расстояние не более 10 см и коснитесь значка "Подключить". Повторите манипуляцию для второго приемника.
- Можно отключить звук Roger Touchscreen Mic, нажав на кнопку "Отключить звук". Световой индикатор, обрамляющий кнопку, начнет мигать красным цветом.
- В конце рабочего дня выключите Roger Touchscreen Mic, нажав и удерживая в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. На экране появится запрос на подтверждение действия. Коснитесь значка "Да" (галочка). Ежедневно заряжайте микрофон с помощью зарядного устройства USB или Roger Charging Rack.



Приемник

Roger X

- Присоедините Roger X к слуховому аппарату с помощью соответствующего аудиоадаптера. Приемник готов к использованию.
- После подключения приемников к сети Roger их не надо подключать повторно.
- Если приемник нужно оставить в школе, отсоедините его от слухового аппарата в конце рабочего дня в соответствии с указаниями специалиста.



Интегрированный в дизайн приемник Roger

- Интегрированные в дизайн приемники Roger предназначены для конкретных слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов.
- После подключения приемников к сети Roger их не надо подключать повторно, даже после выключения и включения.
- Не следует отсоединять интегрированные в дизайн приемники.

