

# Использование Roger inspiro для создания малых групп


Краткое руководство

roger

Если вам нужно поговорить с небольшой группой детей в то время, как другой педагог продолжает вести урок, вы легко можете создать временную вторую сеть (подсеть) с помощью специальной функции Roger, именуемой SubNet. Для этого не нужно выбирать другую частоту, а возвращение в главную сеть осуществляется посредством команды EndSub.

## Настройка

**Присвойте левой функциональной клавише Roger inspiro функцию SubNet/EndSub** (это делается однократно):

1. Нажмите "OK".
2. Выберите "Настройки" и нажмите "OK".
3. Выберите "Конф. клавиш" и нажмите "OK".
4. Выберите "Левая клавиша" и нажмите "OK".
5. Выберите "SubNet/EndSub" и нажмите "OK".
6. Чтобы вернуться в главное меню, несколько раз нажмите .

## Использование

### Создание SubNet

1. Нажмите функциональную клавишу "SubNet". Название клавиши изменится на "EndSub".
2. Поднесите Roger inspiro к приемнику на расстояние не более 10 см и нажмите "Связь".

### Завершение работы подсети (EndSub)

1. Нажмите функциональную клавишу "EndSub".
2. Поднесите Roger inspiro к приемнику на расстояние не более 10 см и нажмите "Связь". Повторите операцию для всех приемников, входивших в подсеть.

