

Использование Roger inspiro и Roger X

Краткое руководство

roger



Микрофон-передатчик: Roger inspiro

Инструкция по применению

1. Чтобы включить Roger inspiro, сместите выключатель влево до появления зеленой метки. Экран начнет светиться.
2. Прикрепите микрофон зажимом к одежде на расстоянии не более 20 см от рта или наденьте гарнитурный микрофон так, чтобы он находился напротив рта.
3. Если приемники учащегося нужно подключить к сети, поднесите передатчик к одному из приемников Roger X на расстояние не более 10 см и нажмите функциональную клавишу "Связь". Если учащийся пользуется двумя приемниками Roger X, повторите операцию с другой стороны.
4. Заблокируйте клавиатуру Roger inspiro, нажав клавишу , а затем "ОК". В строке состояния появится значок ключа.
5. В конце дня выключите Roger inspiro, сдвинув выключатель вправо, и подключите шнур зарядного устройства к разъему мини-USB.



Приемник: Roger X

Инструкция по применению

1. Присоедините приемник Roger X к слуховому аппарату с помощью соответствующего аудиоадаптера. Приемник готов к использованию.
2. Если приемник нужно оставить в школе, в конце дня отсоедините аудиоадаптер с приемником от слухового аппарата.

