

Использование Roger inspiro с интегрированными в дизайн приемниками Roger


Краткое руководство

roger



Микрофон-передатчик: Roger inspiro

Инструкция по применению

1. Чтобы включить Roger inspiro, сместите выключатель влево до появления зеленой метки. Экран начнет светиться.
2. Прикрепите микрофон зажимом к одежде на расстоянии не более 20 см от рта или наденьте гарнитурный микрофон так, чтобы он находился напротив рта.
3. Если приемники учащегося нужно подключить к сети, поднесите передатчик к одному из приемников Roger на расстояние не более 10 см и нажмите функциональную клавишу "Связь". Если учащийся пользуется двумя приемниками Roger, повторите операцию с другой стороны.
4. Заблокируйте клавиатуру, нажав клавишу , а затем "ОК". В строке состояния появится значок ключа.
5. В конце дня выключите Roger inspiro, сдвинув выключатель вправо, и подключите шнур зарядного устройства к разъему мини-USB.



Приемники: интегрированные в дизайн приемники Roger

Инструкция по применению

1. Присоедините интегрированные в дизайн приемники Roger к слуховым аппаратам согласно руководству пользователя.
2. Отсоединять приемники в конце дня не следует. Они предназначены для постоянного нахождения на слуховых аппаратах.

