

Использование Roger для личной беседы

Краткое руководство

roger



Если вы – единственный педагог в классе, и вам надо лично переговорить с ребенком, пользующимся приемником Roger, вы можете быстро создать новую сеть. Это особенно полезно, если в классе используется система звукового поля.

Создание новой сети для отключения вашего микрофона от общей сети и разговора с конкретным ребенком (или несколькими детьми)

1. Нажмите клавишу "OK" передатчика Roger inspiro.
2. Выберите "Сеть" и нажмите клавишу "OK".
3. Выберите "Создать NewNet" и нажмите клавишу "OK".
4. Подтвердите действие, нажав "Да".
5. Поднесите Roger inspiro к приемнику Roger того ребенка, с которым вы хотите поговорить лично, и нажмите клавишу "Связь".
6. Повторите операцию со всеми приемниками, которые вы хотите подключить к этой новой сети.

Возвращение Roger inspiro и приемников в сеть класса

1. Нажмите клавишу "OK".
2. Выберите "Сеть" и нажмите клавишу "OK".
3. Поднесите Roger inspiro к верхней части колонки DigiMaster или к любому приемнику Roger, не подключаемому к новой сети, на расстояние не более 10 см.
4. Выберите "JoinNet" и нажмите клавишу "OK". Следуйте подсказкам на экране.
5. Верните приемники, подключившиеся к новой сети, в общую сеть класса. Для этого поочередно поднесите Roger inspiro к каждому приемнику на расстояние не более 10 см и нажмите клавишу "Связь".
6. Если в классе установлен WallPilot, дети могут вернуться в общую сеть класса, подойдя к WallPilot на расстояние от 1 до 3 м.