

Использование аудиочекера для проверки Roger X

Краткое руководство

roger



Инструкция по применению

1. Необходимо зарядить аудиочекер перед использованием.
2. Подключите приемник Roger X к фронтальному разъему. Диаметр штырьков должен соответствовать диаметру гнезд разъема.
3. Подключите наушники к соответствующему гнезду аудиочекера. Включите аудиочекер.
4. Включите микрофон Roger. После этого вы должны услышать в наушниках звук, передаваемый микрофоном.
5. Если вы не слышите звук, следуйте приведенным ниже рекомендациям:
 - a. Нажмите клавишу "Связь" (Roger inspiro) или коснитесь значка "Подключить" (Roger Touchscreen Mic). Если звук появился, это значит, что приемник не был подключен к сети.
 - b. Проверьте, не отключен ли микрофон передатчика.
 - c. Если это не помогло, обратитесь к специалисту.

