

# Использование расширенных сетевых функций Roger™ Touchscreen Mic

Краткое руководство

roger



Если несколько студентов и педагогов пользуются устройствами Roger в одном классе, могут потребоваться некоторые дополнительные действия, не ограничивающиеся функцией "Подключить". Например, педагог сможет ежедневно проверять устройства учащихся, а второй педагог (в некоторых классах занятия одновременно ведут два педагога) сможет при необходимости поговорить только с одним учеником или небольшой группой учащихся. Для этого следует выполнить несколько простых действий.



Функция "Отключить" позволяет педагогу отключить устройство ученика от сети, например, если ученик должен работать самостоятельно, не слушая сигнал микрофона Roger. При этом остальные учащиеся будут по-прежнему слышать педагога.

- Перейдите на второй экран микрофона Roger Touchscreen Mic и коснитесь значка "Отключить". Микрофон должен находиться на расстоянии не более 10 см от отключаемого устройства.
- Чтобы вновь подключить ребенка к сети, поднесите микрофон Roger Touchscreen Mic к его приемнику на расстояние не более 10 см и коснитесь значка "Подключить" или же попросите ученика подключиться посредством Roger WallPilot.



Функция "SubNet" (подсеть) позволяет педагогу говорить с одним или несколькими учащимися в течение непродолжительного времени; при этом остальные ученики не будут слышать педагога. Эта функция полезна для индивидуальной работы или помощи отдельным ученикам. Функция "SubNet" также позволяет использовать вторичный микрофон в режиме малой группы.

- Коснитесь значка "SubNet" на главном экране микрофона Roger Touchscreen Mic.
- Подключите приемники учеников к подсети, поднеся микрофон Roger Touchscreen Mic к их приемникам на расстояние не более 10 см и коснувшись значка "Подключить".
- Микрофон может оставаться на нашейном шнуре педагога или же находиться на столе (для перехода в режим малой группы).
- Чтобы вернуть приемники учеников в общую сеть, коснитесь значка "Сеть", а затем значка "Подключить", или же попросите учеников подключиться посредством Roger WallPilot.



Функция "JoinNet" (присоединиться к сети) используется для того, чтобы подключить Roger Touchscreen Mic к нужной сети, не отвлекая главного говорящего (педагога). Это альтернативное решение при отсутствии Roger WallPilot.

- Коснитесь значка "JoinNet", поднеся микрофон Roger Touchscreen Mic на расстояние не более 10 см к любому устройству Roger, подключенному к нужной вам сети.



Функция "NewNet" используется, если Roger Touchscreen Mic должен покинуть текущую сеть или же для сброса настроек текущей сети и создания новой сети.

- Коснитесь значка "NewNet".
- Чтобы подключить любое устройство Roger к вновь создаваемой сети, поднесите микрофон Roger Touchscreen Mic на расстояние не более 10 см к соответствующему устройству Roger и коснитесь значка "Подключить".



Функция "Mass Connect" (общее подключение) используется для очень быстрого подключения к сети нескольких устройств, находящихся в непосредственной близости друг от друга. Данную опцию следует предварительно сконфигурировать в меню "Настройки". Для этого коснитесь значка "Настройки" и выберите в открывшемся меню пункт "Подключить" → Mass Connect.

- Разместите все приемники Roger рядом друг с другом и убедитесь, что они включены.
- Коснитесь значка "Mass Connect" и поочередно поднесите микрофон Roger Touchscreen Mic к каждому из подключаемых к сети устройств на расстояние не более 10 см. Устройства будут подключаться к сети одно за другим пор мере поднесения к ним Roger Touchscreen Mic.
- Чтобы завершить "Mass Connect", коснитесь всплывающего окна.
- Чтобы убедиться в том, что все устройства подключены, коснитесь значка "Устройства".
- Если устройство отсутствует в списке, повторно поднесите к нему микрофон Roger Touchscreen Mic и коснитесь значка "Mass Connect".



Функция "Устройства" используется для быстрого поиска находящихся в непосредственной близости устройств Roger и проверки их подключения к Roger Touchscreen Mic.

- Все устройства Roger должны находиться на расстоянии не более 10 см от Roger Touchscreen Mic.
- Коснитесь значка "Устройства".
- Откроется список всех находящихся в непосредственной близости от микрофона Roger Touchscreen Mic устройств Roger (необходимое для этого время зависит от количества устройств). Доступные устройства представлены серым цветом, а подключенные устройства выделены черным цветом и отмечены значком подключения.
- Если нужное устройство Roger отсутствует в списке, поднесите к нему Roger Touchscreen Mic на расстояние не более 10 см и коснитесь значка "Подключить".