

Подключение Roger AudioHub к Roger inspiro

Краткое руководство



Подключение

1. Подключите Roger AudioHub к источнику питания.
2. Поднесите микрофон Roger к Roger AudioHub на расстояние не более 10 см. Нажмите клавишу "Связь".
3. Подключите Roger AudioHub к звуковоспроизводящему устройству, вставив штекер аудиошнура в гнездо "Audio IN" на задней поверхности Roger AudioHub. При подключении только одного звуковоспроизводящего устройства воспользуйтесь гнездом "1".
Подключите второй конец аудиошнура к звуковоспроизводящему устройству (MP3-плееру, телевизору, компьютеру и т.п.).
4. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения Roger AudioHub . После этого включите воспроизведение звука.
5. Вначале отрегулируйте громкость звуковоспроизводящего устройства, а затем громкость Roger AudioHub.



Световая индикация Roger AudioHub

	Постоянный красный - Roger AudioHub выключен
	Постоянный синий – Стандартный рабочий режим
	Мигающий синий – Микрофон Roger выключен или вне радиуса действия
	Постоянный зеленый – Звук микрофона отключен
	Зеленый → красный – Регулировка громкости +/-
	Мигающий желтый – Обновление прошивки
	Мигающий красный – Обратитесь в службу поддержки
	Попеременное красно-желтое мигание – Неправильно подключен шнур