

# Создание сети Roger™ в классе


Краткое руководство

roger



Вся продукция Roger для обучения предназначена для простого совместного использования. Все, что требуется, это просто объединить нужные устройства в сеть. Способ создания сети зависит от конкретных задач. Выбор за вами.

## Подключение устройств Roger посредством функции "Подключить"

Чтобы подключить перечисленные ниже устройства к сети Roger, поднесите к ним микрофон Roger на расстояние не более 10 см и коснитесь значка "Подключить" :

- Миниатюрные приемники Roger
- Roger MyLink
- Roger Focus
- Микрофоны Roger
  - Roger Touchscreen Mic
  - Roger Pass-around
  - Roger inspiro\*
  - Roger DynaMic\*
- Roger Multimedia Hub
- Roger AudioHub\*
- Колонки Roger DigiMaster 5000\*\*, 7000\*\*
- Roger DigiMaster X

\* При подключении этих устройств к многопользовательской сети с помощью Touchscreen Mic в качестве главного передатчика коснитесь значка "Подключить" и следуйте подсказкам на экране Touchscreen Mic.

\*\* Подключая колонку Roger DigiMaster, поднесите микрофон Roger к ее верхней части.

## Подключение устройств Roger посредством Roger WallPilot



**Приемники Roger** – Дети должны просто подойти к Roger WallPilot (расстояние между приемниками и WallPilot не должно превышать 30 см) и постоять рядом с ним в течение нескольких секунд.

**Микрофоны и мультимедийные передатчики Roger** – Чтобы подключить перечисленные ниже микрофоны и мультимедийные передатчики Roger, необходимо поднести их к Roger WallPilot на расстояние не более 10 см, выключить, а затем вновь включить:

- Roger Touchscreen Mic
- Roger Pass-around
- Roger Multimedia Hub
- Roger inspiro
- Roger DynaMic