

Phonak

Микрофоны Roger™ iN

Руководство по установке приемников Roger

Содержание

Установка приемников Roger в пару слуховых аппаратов с функцией RogerDirect™


Проверка количества приемников в микрофоне Roger iN

Удаление приемников Roger из слухового аппарата


Установка приемников Roger в пару слуховых аппаратов с функцией RogerDirect™

Этапы установки:


1. Включите микрофон Roger iN
2. Нажмите и удерживайте кнопку установки в течение двух секунд, пока световой индикатор не начнет мигать зеленым цветом или на экране Roger On iN не появится значок слухового аппарата:

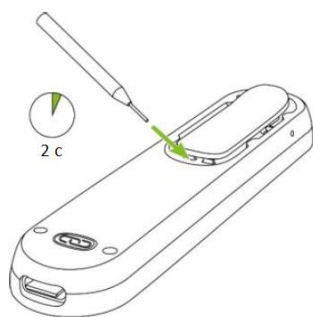


Roger On™ iN

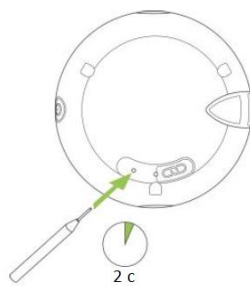

Roger Select™ iN

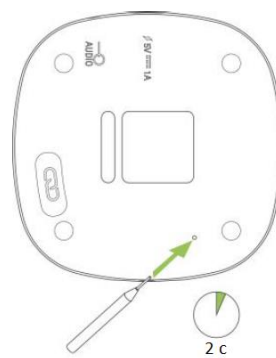


Roger Table Mic II iN

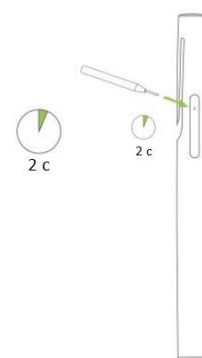

Roger Pen™ iN

3. Положите микрофон Roger iN на стол
4. Включите один слуховой аппарат (остальные слуховые аппараты должны быть выключены)

5. Положите слуховой аппарат рядом (не дальше 10 см) с микрофоном Roger iN

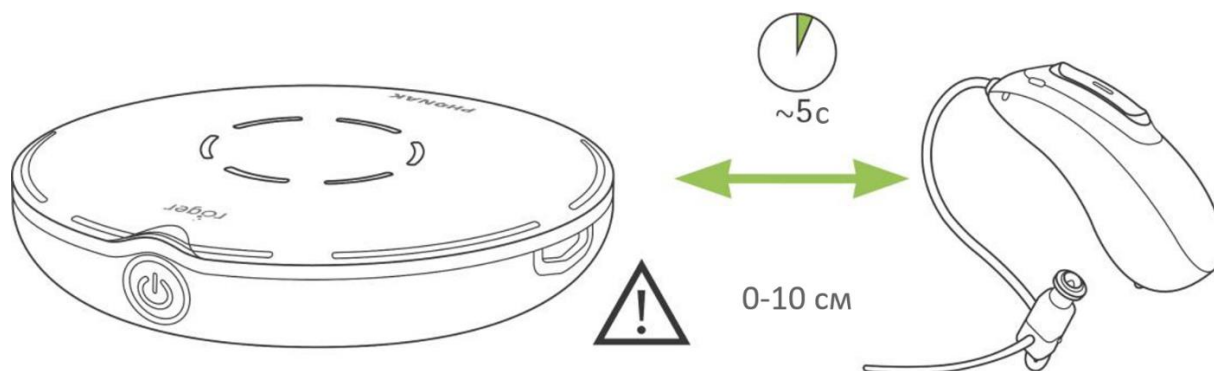

6. Подождите около 5 секунд, пока световой индикатор микрофона Roger iN не загорится постоянным зеленым светом или на экране Roger On iN не появится значок галочки.

7. Повторите шаги 2-6 для второго слухового аппарата.

Примечание: Слуховые аппараты автоматически подключаются к микрофону Roger iN.

Красное свечение индикатора в ходе процедуры установки свидетельствует об ошибке установки.

Возможные причины:

- Слишком большое расстояние между микрофоном Roger iN и слуховым аппаратом
- В микрофоне Roger iN отсутствуют приемники Roger
- Слуховой аппарат уже содержит установленный приемник Roger
- Слуховой аппарат несовместим с RogerDirect.

Проверка количества приемников в микрофоне Roger iN

После включения микрофона Roger iN коротко нажмите кнопку установки:

На экране Roger On In отобразится количество доступных приемников Roger.


У микрофонов Roger Select iN, Roger Pen iN и Roger Table Mic II наличие доступных приемников Roger отображается световой индикацией:

- ● Микрофон содержит два приемника Roger
- ● Микрофон содержит один приемник Roger
- ● Микрофон не содержит приемников Roger


Удаление приемников Roger из слухового аппарата

Этапы удаления:


1. Включите микрофон Roger iN
2. Нажмите и удерживайте кнопку установки в течение двух секунд, пока световой индикатор не начнет мигать зеленым цветом или на экране Roger On iN не появится значок слухового аппарата:

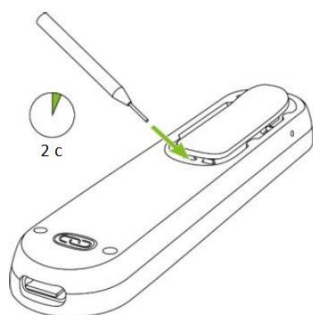


Roger On™ iN

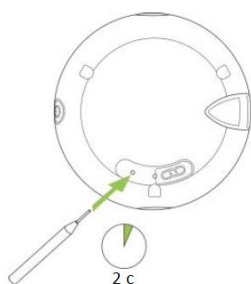

Roger Select™ iN

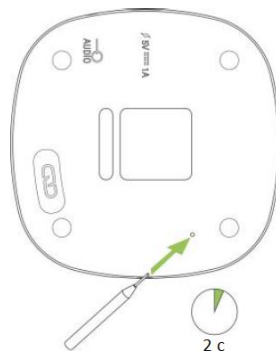


Roger Table Mic II iN

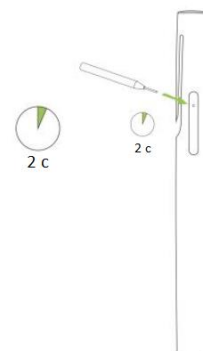

Roger Pen™ iN

3. Положите микрофон Roger iN на стол
4. Включите один слуховой аппарат (остальные слуховые аппараты должны быть выключены)
5. Положите слуховой аппарат рядом (не дальше 10 см) с микрофоном Roger iN

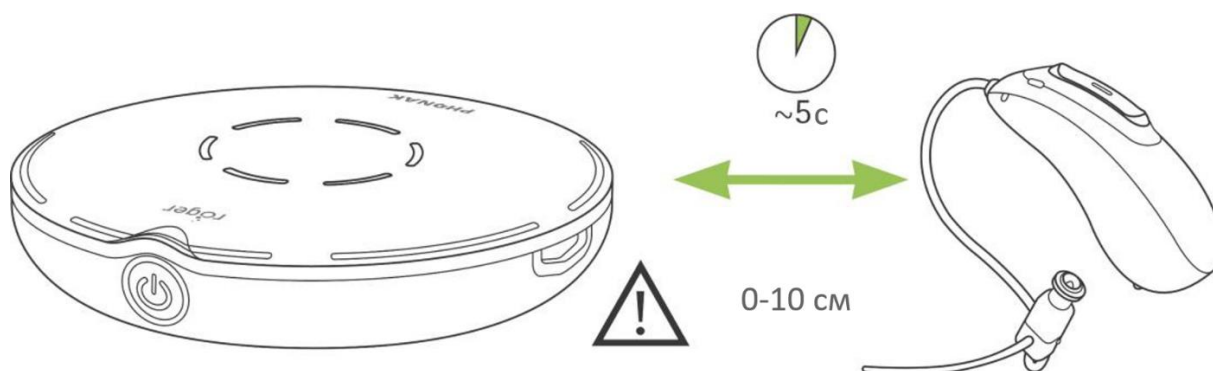

6. Подождите около 5 секунд, пока световой индикатор микрофона Roger iN не загорится постоянным зеленым светом или на экране Roger On iN не появится значок галочки
7. Повторите шаги 2-6 для второго слухового аппарата.

Красное свечение индикатора в ходе процедуры удаления приемника или появление крестика или вопросительного знака на экране Roger On iN свидетельствует об ошибке удаления. Возможные причины:

- Слишком большое расстояние между микрофоном Roger iN и слуховым аппаратом
- Микрофон Roger iN уже содержит два приемника Roger
- В слуховом аппарате не установлен приемник Roger
- Слуховой аппарат несовместим с RogerDirect.