

Phonak

Краткое руководство

Использование RogerDirect™ в слуховых аппаратах Phonak

Установка приемника Roger™ в слуховой аппарат Phonak с помощью Roger Installer

- a. Подключите Roger X к Roger Installer (3)
- b. Включите Roger Installer (1) (световой индикатор [2] загорится постоянным зеленым цветом)
- c. Световой индикатор (4) загорится постоянным зеленым цветом (Roger X готов к установке)
- d. Включите слуховой аппарат и положите его на изображение слухового аппарата на Roger Installer
- e. Световой индикатор (5) начнет мигать зеленым цветом (идет установка); постоянное зеленое свечение индикатора (5) означает завершение установки
- f. Выключите Roger Installer. Отсоедините и уберите в надежное место Roger X. Слуховой аппарат готов к использованию функции RogerDirect.

Удаление приемника Roger из слухового аппарата Phonak и возвращение его в Roger X

- a. Подключите Roger X к Roger Installer (3)
- b. Включите Roger Installer (1) (световой индикатор [2] загорится постоянным зеленым цветом)
- c. Световой индикатор (4) не горит в течение нескольких секунд (Roger X готов к удалению приемника Roger из слухового аппарата)
- d. Включите слуховой аппарат и положите его на изображение слухового аппарата на Roger Installer
- e. Дождитесь постоянного зеленого свечения индикатора (5) (подтверждает, что в данном слуховом аппарате есть приемник Roger)
- f. Когда начнется удаление приемника, индикатор (5) замигает зеленым цветом; мигание индикатора продолжится до завершения удаления
- g. Постоянное зеленое свечение индикатора (4) свидетельствует о завершении удаления приемника (теперь приемник находится в Roger X)
- h. Выключите Roger Installer. Отсоедините Roger X. Слуховой аппарат больше не может использоваться с Roger.

