

Phonak

Информационный бюллетень

TV Connector

Что такое TV Connector?

TV Connector – простое в использовании устройство потоковой передачи аудиосигнала, непосредственно подключающее совместимые слуховые аппараты Phonak к любому телевизору или медиаплееру без необходимости использования дополнительного стримера. Благодаря технологии AirStream™ устройство TV Connector обеспечивает высочайшее качество звучания телевизора или стереосистемы.



Что умеет TV Connector?

TV Connector предлагает:

- Простое решение "plug and play" (включил и играй)
- Совместимость с Dolby™
- Удобную передачу звука в аппараты нескольких слушателей в радиусе до 15 м
- 3 режима активации (автоматически, вручную и без предупреждающего сигнала)
- Элементы управления (кнопки вкл./выкл. и регулировки громкости)

Как пользоваться TV Connector?

TV Connector подключается без дополнительной настройки к любому телевизору с цифровым (оптический разъем Toslink) или аналоговым (разъем диаметром 3,5 мм) интерфейсом. Потоковая передача аудиосигнала начинается автоматически после включения телевизора и устройства TV Connector, если клиент находится на расстоянии не более 15 м от TV Connector. Специалист может изменить режим активации в соответствии с потребностями клиента. Чтобы подключиться к нескольким пользователям, нажмите кнопку сопряжения на TV Connector. Клиенты, находящиеся на расстоянии не более 1 м от TV Connector, автоматически подключаются к устройству.

Более подробную информацию о TV Connector вы можете получить на сайте:

www.phonakpro.com/tvconnector



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.